





Instrucciones de uso


Bomba de aire

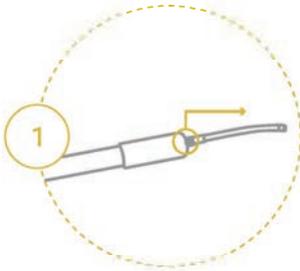


Saque la manguera del mango de la bomba.

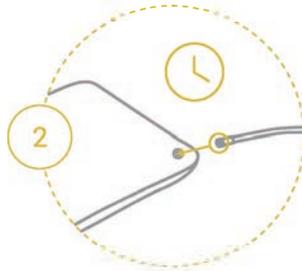


Enrosca la manguera en la válvula del cojín y espera hasta que el cojín esté lo suficientemente blando.

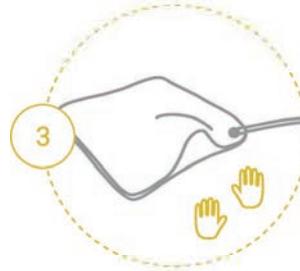


Haga el modelado de la forma previa

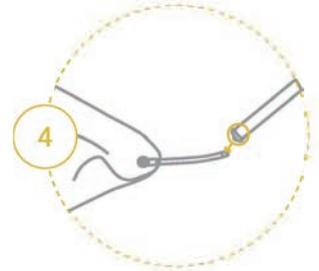

Conecte la bomba de aire a la manguera y aspire el aire hasta que se alcance la dureza deseada.

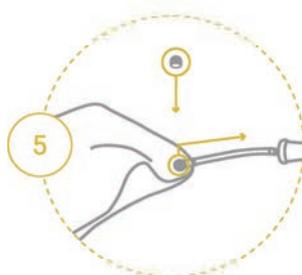


Desenrosque la manguera del cojín y enrosque el tapón de seguridad en la válvula.

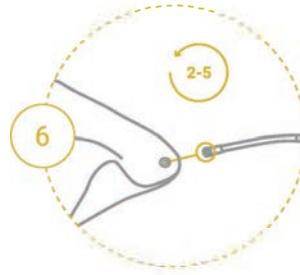


Para cambiar la forma, enrosque la manguera en la válvula, espere a que el cojín se ablande y luego repita los puntos del 2 a 5.


Bomba de aire eléctrica

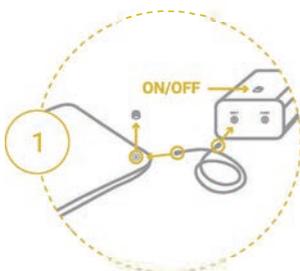


Desenrosque el tapón de la válvula, enrosque la manguera en la válvula del cojín, presione la otra parte en el enchufe SOFT y encienda la bomba. Espere hasta que el cojín esté lo suficientemente blando, entonces apaga la bomba.

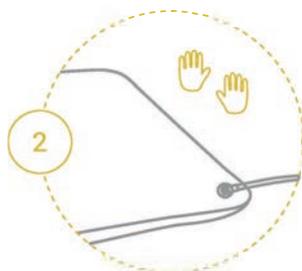

Haga el modelado de la forma previa

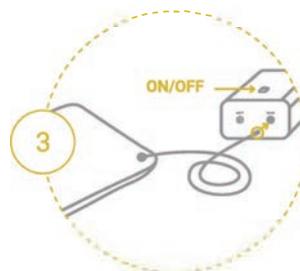

Cambie la posición de la manguera en la bomba de aire electrónica de SOFT a HARD y enciéndala para aspirar el aire hasta que se alcance la dureza deseada.

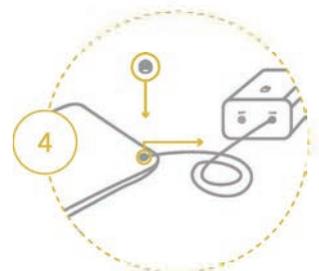

Desenrosque la manguera y coloque el tapón en el cojín



Lavado y desinfección.

Los cojines Stabilo están hechos de neopreno cubierto con tela de nylon. Son muy duraderos y completamente impermeables. Se pueden lavar bajo agua corriente, en una bañera o en una lavadora hasta 40°C usando detergentes para telas artificiales. Es posible usar preparados desinfectantes aplicados para desinfectar la ropa médica. Después del lavado, el producto conserva sus dimensiones y propiedades.



Garantía

Cada cojín del sistema Stabilo, como dispositivo médico, está cubierto por una garantía de 24 meses. Después de este período, ofrecemos un servicio de reparación.

Stabilo Velcro

El chaleco universal apoya la corrección y estabilización del torso y puede ayudar a prevenir la anteversión. Esta solución permite su sujeción, la fijación de otros artículos como correas de fijación o a asientos fijos. Todos los All Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Flat, Banana se producen siempre en la versión de velcro. Otros productos pueden ser ordenados opcionalmente con velcro.

Certificados



Los materiales utilizados en el Stabilo System Cushion están certificados como antibacterianos.



El Multiseat usado como asiento de coche está aprobado por la ECE R44/04.



Los materiales utilizados en el Cojín del Sistema Stabilo están certificados como incombustibles.



Los materiales utilizados en el Stabilo System Cushion no contienen látex.