



MOTILO STYLE

ANDADOR CON CORSÉ
A MEDIDA

REF. SS SRC 020A

by **Janton**





ANDADOR MOTILO STYLE



El andador Motilo Style se caracteriza por su corsé fabricado a medida, con respaldo extraíble.

Está especialmente indicado para facilitar la marcha a niños y niñas con parálisis cerebral o con alguna discapacidad neurológica, siempre que no exista contraindicación médica.

Múltiples beneficios: da al niño/niña la posibilidad de moverse, divertirse, interactuar y socializar con su entorno. Ser más autónomo. Una cierta sensación de libertad. A la vez, fortalece sus huesos evitando la descalcificación y promueve el desarrollo musculoesquelético.

Corsé a medida con respaldo extraíble.

Fabricado con polietileno de alta densidad en proceso de termoformado al vacío.

Acolchado interno de espuma de 3 cm de grosor.

Acolchado forrado.



Corsé con respaldo extraíble*

*excepto en la talla 0



Empuñadura ajustable en altura y ángulo



Ajustable en profundidad



Ruedas giratorias con freno de estacionamiento


PAPEL TRANSFER




WTA245



WTA243

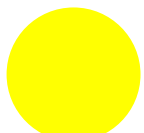

WTA242

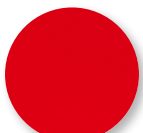


WTA241



WTA240



WTA244

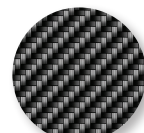

WTA201



WTA234



WTA238



WTA237



WTA236



WTA225



WTA206



WTA221



WTA210



WTA233



WTA224



WTA217



WTA223



WTA227



WTA207



WTA232



WTA230



WTA231



WTA208



WTA209



WTA214



WTA216



WTA205



WTA228



WTA212



WTA226



WTA219



WTA218



WTA215



WTA229



WTA239



WTA202



WTA220



WTA235



WTA211



WTA204



WTA203



WTA222



WTA213



WTA601



WTA602



WTA603



WTA604



WTA609



WTA610



WTA611



WTA612



WTA613



WTA614



WTA615



WTA616

Más de 50 modelos de transfer a elegir para personalizar el corsé a medida.

COLORES FUNDA INTERNA



Azul



Rosa



Verde



Gris



Negro



Rojo

COLORES DE CHASIS



Azul oscuro



Azul claro



Verde pastel



Rosa



Violeta



Rojo



Negro

COLORES DEL PROTECTOR DE PLÁSTICO



Amarillo



Rojo



Negro




Blanco

TALLAS

TALLA	T0	T1	T2	T3
Distancia periné-suelo	21,5 - 38 cm	38 -51 cm	50 - 65 cm	55 - 80 cm
Límite de peso	15 kg	20 kg	35 kg	50 kg
Límite de altura	1 m	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Edad	3 - 5 años	4 - 6 años	7 - 12 años	joven o adulto

ACCESORIOS

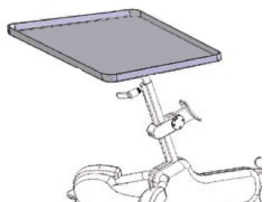

Kit soporte y mesa



Reposacabezas



Empuñaduras



Barra de empuje



Separador de piernas



Ruedas todo terreno



Kit
2 ruedas con bloqueo de dirección
+ 2 ruedas freno de bloqueo

KIT ADHESIVOS DECORACION



Circuito



Cosmos



Hadas



Kart



Princesas




Vet



Unicornio

AJUSTES DEL SILLÍN DE MOTILO

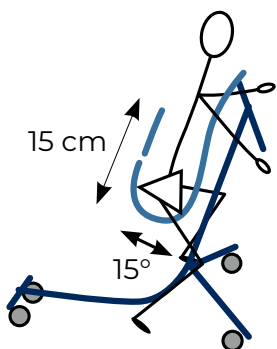


La regulación del corsé tanto en altura como en inclinación permite adoptar la posición idónea para reeducar la marcha del niño afecto de discapacidad neuromotriz.


Una mayor inclinación del tronco provoca un desplazamiento posterior de la extremidad inferior, favoreciendo la propulsión anterior al extender las articulaciones de cadera y rodilla.

A medida que va evolucionando el patrón de marcha se debe regular la inclinación hacia la vertical (90°).



Un margen de regulación de 15 cm permite ajustar la altura adecuada en cada etapa del proceso de reeducación.

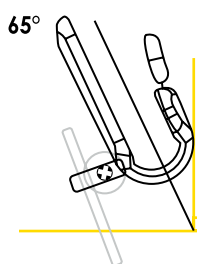

Inclinación propicia para debutantes.

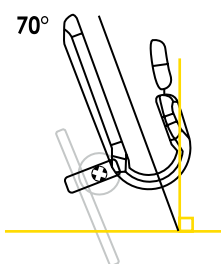


Regulación progresiva del ángulo de flexión del eje corporal.

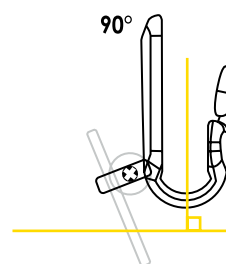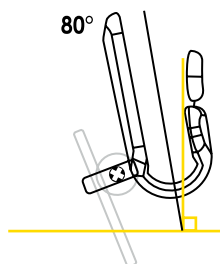

Atención!

Para garantizar una estabilidad perfecta, el ángulo de flexión de la cadera no debe superar los 15°. Para ello, ajuste correctamente la altura del sillón.

MEDIDAS (en mm)	T0	T1	T2	T3
A. Anchura delantera	480	600	700	800
B. Anchura trasera	370	460	530	600
C. Longitud	650 / 700 / 750	850 / 900 / 950	1020 / 1070 / 1120	1200 / 1250 / 1350
D. Ancho del manillar	270	350	450	450
E. Distancia periné-suelo	de 215 a 380	de 380 a 510	de 500 a 650	de 550 a 800
F. Inclinación asiento	65° / 70° / 80° / 90°			

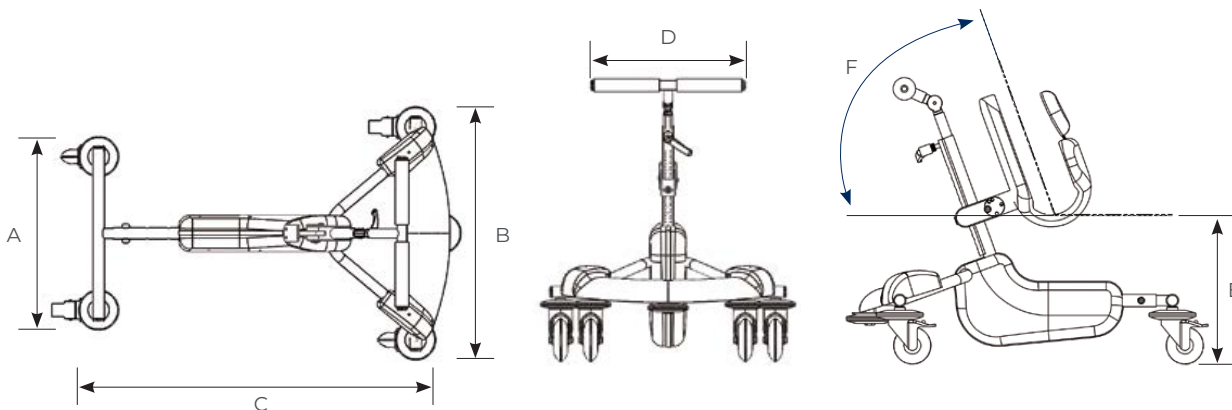




SEDESTACIÓN



BIPEDESTACIÓN

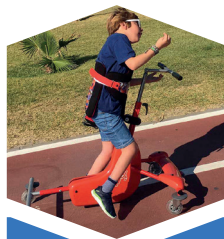

MOVILIDAD




CHASIS



FUNDAS



DESCANSO

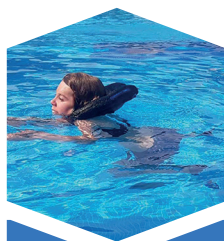

BAÑO



ACCESORIOS



PLANTILLAS



CORSÉS



MINERVAS



KAFO Y AFO



HERRAMIENTAS



MATERIALES

Visita nuestra web
www.handyfs.com

Calle Ponent, 8
17458 Fornells de la Selva
Girona

972 47 65 01

info@handyfs.com

