

NEATECH™



STEADY

MANUAL DEL USUARIO

2021-11

PRODUCTO	STEADY
OTROS NOMBRES	
PART NUMBER / CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	S307
CONFORMIDAD CE	 <p>Reglamento UE 2017/745 - Producto sanitario de clase I - Regla 1</p>
PRINCIPALES NORMAS APLICADAS	ISO 14971:2012 UNI EN 12182:2012
FABRICANTE	Neatech.it SRL via A. de Curtis 4/A, 80040, Cercola (NA), Italia Tel. +39 081 555 1946 www.neatech.it - info@neatech.it
USO PREVISTO	El producto está destinado a mitigar o compensar una lesión o discapacidad. El producto está destinado a personas con dificultades para adoptar o mantener de forma independiente una posición erguida.



Nos preocupamos mucho por la calidad, la seguridad y la facilidad de uso de nuestros productos. Siempre nos esforzamos por mejorarlos. Descargue la última versión de este manual en este enlace.

<https://www.neatech-download.it/s307-manual/>

Índice

1. PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO	2
1.1. DESEMBALAJE.....	2
2. AJUSTES.....	3
2.1. ÁNGULO DEL PLANO INCLINADO	7
2.2. ALTURA DE LA SECCIÓN TRONCO-HOMBRO	9
2.3. ANCHURA DE LOS CONTROLES LATERALES DE LA SECCIÓN TRONCO-HOMBRO	10
2.4. ALTURA DE LA SECCIÓN DE LA PELVIS	12
2.5. ANCHURA DE LOS CONTROLES LATERALES DE LA PELVIS.....	13
2.6. ALTURA Y PROFUNDIDAD DE LA RODILLERA	15
2.7. ÁNGULO, ROTACIÓN Y ANCHURA DE LA RODILLERA	16
2.8. ALTURA DE LAS PALETAS DEL REPOSAPIÉS	17
2.9. ÁNGULO DE LAS PALETAS DEL REPOSAPIÉS	18
2.10. ABDUCCIÓN-ADUCCIÓN Y ROTACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PIE.....	19
2.11. ALTURA DEL REPOSACABEZAS.....	21
2.12. ALTURA DE LA BARRA DEL REPOSACABEZAS	22
2.13. POSICIÓN DE LA ALMOHADILLA DEL REPOSACABEZAS	23
2.14. POSICIÓN DEL REPOSACABEZAS	24
2.15. ALTURA DE LA MESA	25
2.16. ÁNGULO DE LA MESA	27
2.17. PROFUNDIDAD DE LA MESA	28
3. USO DEL PRODUCTO.....	30
3.1. USO DE LOS FRENOS.....	30

3.2.	POSICIÓN SUPINA	32
3.2.1.	<i>Montaje en configuración supina</i>	33
3.3.	POSICIÓN PRONA	37
3.3.1.	<i>Montaje en configuración prona</i>	38
3.4.	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	41
4.	MANTENIMIENTO	42
4.1.	LIMPIEZA	42
4.2.	CONTROLES PARA REALIZAR EN EL PRODUCTO	43
4.3.	REUTILIZACIÓN	43
5.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	44
5.1.	DIBUJOS	45
6.	ASISTENCIA Y CONDICIONES DE GARANTÍA	47
6.1.	CONDICIONES DE LA GARANTÍA	47
6.2.	NÚMERO DE SERIE	49

SÍMBOLOS DE ESTE MANUAL



ATENCIÓN

Este símbolo indica la presencia de peligro para el usuario o de daños en el producto. Siga siempre las instrucciones cuando este símbolo esté presente.



PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

Este símbolo indica la presencia de un riesgo de atrapamiento.



INFORMACIÓN

Este símbolo indica información general para simplificar o explicar mejor el uso del producto.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Este símbolo indica la necesidad de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado o con el fabricante.



NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

En caso de incidente, póngase en contacto con el fabricante.



Para obtener información sobre la seguridad de los productos y las retiradas relacionadas con ellos, por ejemplo para asegurarse de que el proveedor dispone de información de contacto actualizada, visite el sitio web del fabricante.



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Póngase en contacto con el fabricante para obtener una lista de los centros de servicio autorizados.



Este producto y todas sus piezas no pueden tratarse como residuos domésticos normales. Para obtener más información sobre cómo reciclar y/o desechar este producto, póngase en contacto con su servicio local de eliminación de residuos.



Cualquier modificación no autorizada del producto puede aumentar el riesgo de lesiones personales y daños al producto. Todas las modificaciones deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado. No utilice accesorios ni piezas de repuesto no autorizados.



No utilice el producto en combinación con otros aparatos sanitarios sin antes considerar los posibles riesgos de combinar varios productos. Preste especial atención a la combinación de materiales resistentes a la ignición y no resistentes a la ignición.



ATENCIÓN: Está prohibido utilizar el producto o sus piezas para fines distintos de los indicados en este manual. Siga las instrucciones dadas para un uso adecuado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado del producto.



La información de este manual puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información, figuras y especificaciones se basan en los detalles del producto disponibles en la fecha de redacción de este documento. Son ejemplos representativos y no pretenden ser exactamente iguales al producto real.



PELIGRO DE VUELCO

El peligro de vuelco se reduce considerablemente porque el producto está diseñado conforme a la norma EN 12182. En cualquier caso, tenga especial cuidado al ajustar y utilizar el producto para evitar cualquier daño al usuario o al propio producto.



El centro de gravedad del dispositivo y, por tanto, su estabilidad pueden verse influidos por la posición del usuario y el uso de un soporte.



TEMPERATURA

La temperatura de algunas superficies puede aumentar si el producto se expone a temperaturas ambiente elevadas o a la luz solar directa.



PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

Asegúrese de que dispone de espacio suficiente en la zona por la que se va a desplazar para minimizar el riesgo de atrapamiento.



INFORMACIÓN

Para obtener información sobre cómo las personas con discapacidad visual pueden acceder a la información y las instrucciones, póngase en contacto con el fabricante.



No instale, mantenga ni utilice el producto sin haber leído todas las advertencias y todo este manual.
Conserve siempre este manual cerca del producto.



No lleve pasajeros en el producto, independientemente de la edad del pasajero. El producto no está diseñado para transportar pesos y no es seguro utilizarlo como asiento mientras se transportan pesos.
No desplace su peso hacia la dirección que intenta alcanzar porque el producto podría volcar.
Ciertas patologías pueden limitar la capacidad de utilizar el dispositivo con seguridad. Asegúrese de consultar a un médico para analizar tus limitaciones físicas.



El dispositivo no está diseñado para el transporte y manipulación de personas. No suelte nunca los frenos cuando el usuario esté sobre el dispositivo.

Elevación del producto

No levante el producto con el usuario a bordo. Si es realmente necesario levantar el producto, pida ayuda al menos a otra persona. Sujete el producto utilizando los tubos como se muestra.



Figura 1



ATENCIÓN

El producto no puede utilizarse como asiento en un vehículo de motor.

1. PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO

1.1. Desembalaje

Dentro de la caja puede encontrar:

**Armazón STEADY
Reposacabezas
Soporte de mesa
Mesa
Contención del pié
Manual**

Dentro de la caja puede encontrar:

Producto STEADY
Manual



ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

Para reciclar correctamente los materiales de embalaje, siga las instrucciones de su servicio local de eliminación de residuos.

El producto se suministra tal y como se muestra en la figura. El producto puede montarse en configuración supina o prona. Antes de empezar a utilizar el producto, asegúrese de que todos los componentes están presentes. Es preferible que la primera instalación del producto la realice un centro de servicio autorizado. Para obtener información sobre el montaje en configuración prona y supina, consulte las secciones 3.2, 3.3



Figura 2

2. AJUSTES

Tipo de operación	
A	Operación que puede realizar el usuario.
B	Operación que puede realizar un asistente.
C	Operación que debe ser realizada por un centro de servicio autorizado.



Algunos ajustes pueden afectar a la comodidad y la salud del usuario. Consulte siempre al personal experto en rehabilitación antes de realizar cualquier ajuste.

Ajuste	Tipo de operación	DIM.	Sección
Ángulo del plano inclinado	B - Asistente	α	2.1
Altura de la sección tronco-hombro	B - Asistente	G	2.2
Anchura de los controles laterales de la sección tronco-hombro	B - Asistente	B	2.3
Altura de la sección de la pelvis	B - Asistente	F	2.4
Anchura de los controles laterales de la sección de la pelvis	B - Asistente	C	2.5
Altura y profundidad de la rodillera	B - Asistente	E	2.6

Ángulo, rotación y anchura de la rodillera	B - Asistente	D	2.7
Altura de las paletas del reposapiés	B - Asistente	J	2.8
Ángulo de las paletas del reposapiés	B - Asistente	β	2.9
Abducción-aducción y rotación interna y externa del pie	B - Asistente	ND	2.10
Altura del reposacabezas	B - Asistente	ND	2.11
Altura de la barra del reposacabezas	B - Asistente	ND	2.12
Posición del reposacabezas	B - Asistente	ND	2.14
Posición de la almohadilla del reposacabezas	B - Asistente	ND	2.13
Altura de la mesa	B - Asistente	ND	2.15
Ángulo de la mesa	B - Asistente	ND	2.16
Profundidad de la mesa	B - Asistente	ND	2.17

Cuadro 1

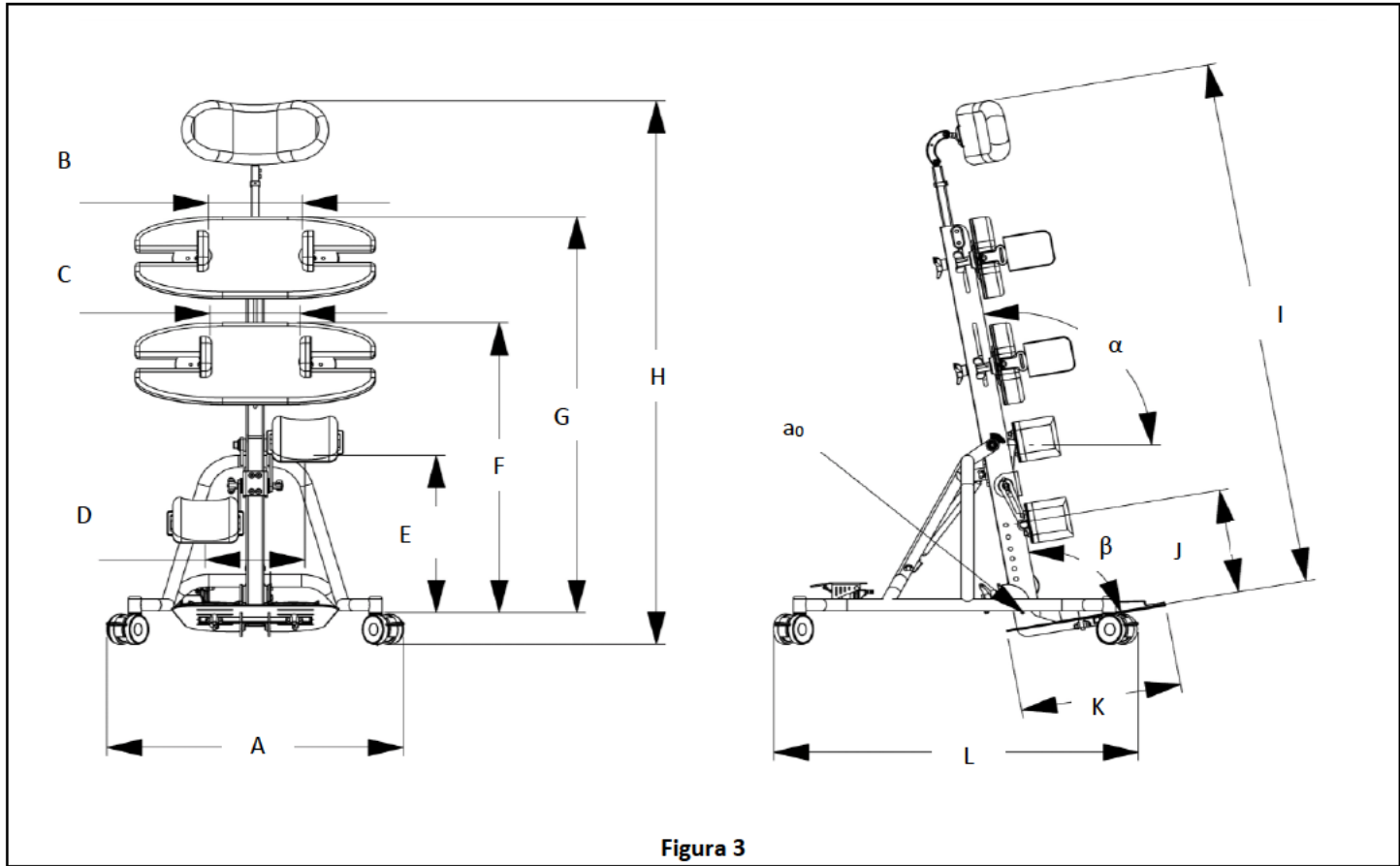


Figura 3

DIM.	Configuración	Rango
A	P01	650 mm
	P02	800 mm
B	P01	MÍN 160 mm MÁX 360 mm
	P02	MÍN 300 mm MÁX 430 mm
C	P01	MÍN 160 mm MÁX 360 mm
	P02	MÍN 300 mm MÁX 430 mm
D	P01	MÍN 180 mm MÁX 280 mm
	P02	MÍN 180 mm MÁX 280 mm
E	P01	MÍN 200 mm MÁX 520 mm
	P02	MÍN 510 mm MÁX 1050 mm
F	P01	MÍN 650 mm MÁX 820 mm

	P02	MÍN 1060 mm MÁX 1220 mm
G	P01	MÍN 850 mm MÁX 1030 mm
	P02	MÍN 1300 mm MÁX 1460 mm
J	P01	MÍN 0 mm MÁX 225 mm (PASO 25 mm)
	P02	MÍN 0 mm MÁX 450 mm (PASO 25 mm)
α	P01	MÍN 100° mm MÁX 180° mm
	P02	MÍN 100° mm MÁX 180° mm
β	P01	MÍN -15° mm MÁX 15° mm
	P02	MÍN -15° mm MÁX 15° mm

Cuadro 2

2.1.Ángulo del plano inclinado

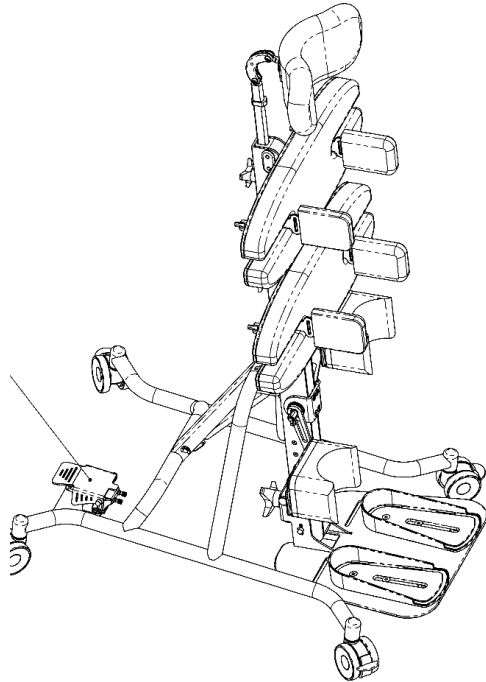


Figura 4



Tiempo medio necesario:
<5 min



Las posiciones angulares del plano inclinado se ajustan mediante un resorte de gas, que se bloquea y desbloquea mediante un pedal situado en la base.

- Utilice la punta del pie para levantar primero la cubierta de seguridad y luego, con la planta del mismo pie, baje el pedal.
- Sin soltar el pedal, realice el ajuste deseado.
- Suelte el pedal.

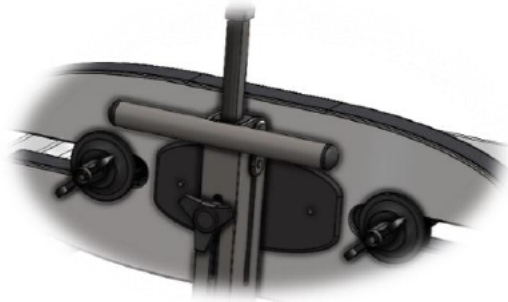


Figura 5

- Utilice la manija que se muestra en la figura para apoyar y acompañar al plano dinámico en su movimiento.


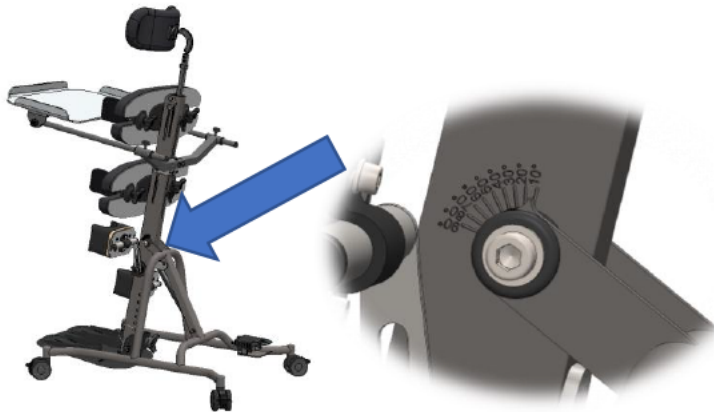


Figura 6

- La escala graduada de la figura muestra el ángulo del plano inclinado.




2.2. Altura de la sección tronco-hombro

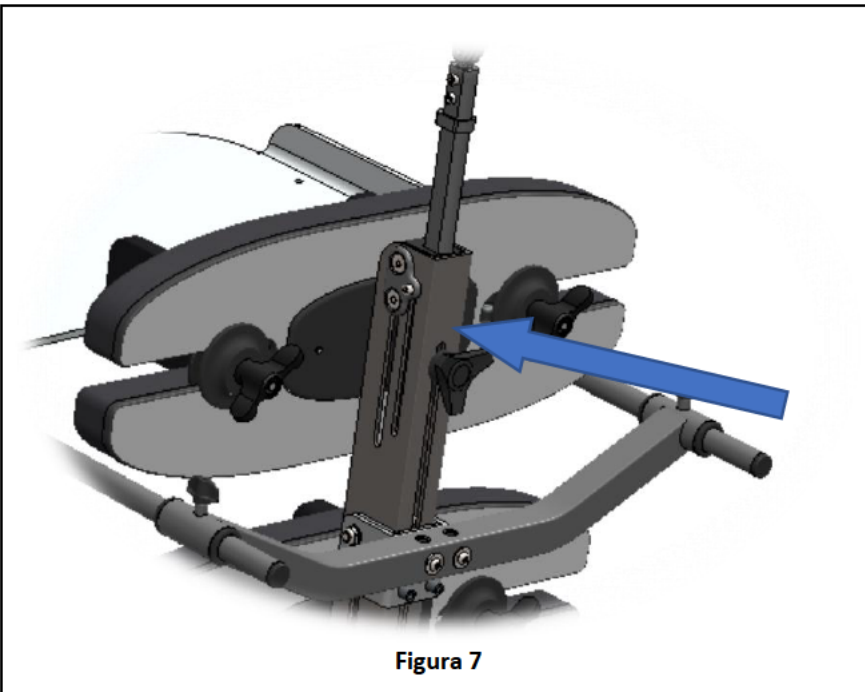


**Tiempo medio
necesario:**
<5 min

- Afloje el pomo que se muestra en la figura.
- Ajustelo como desee.
- Apriete el pomo que se muestra en la figura.

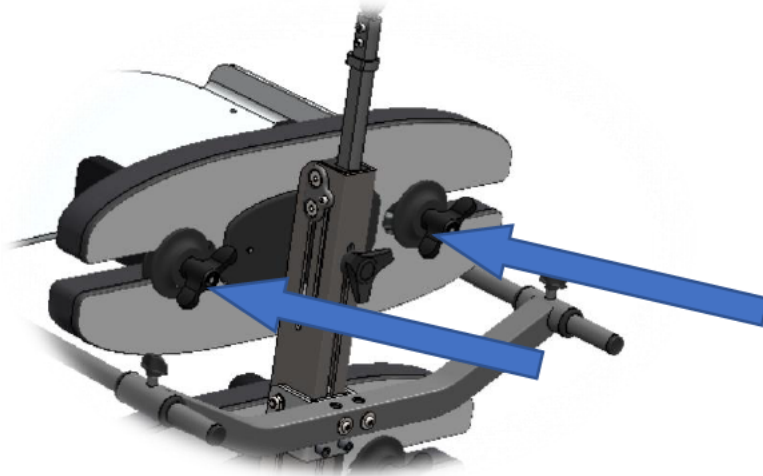2.3. Anchura de los controles laterales de la sección tronco-hombro

 <p>Figura 8</p>	 <p>Tiempo medio necesario: <5 min</p>
	 <p>El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Afloje el pomo que se muestra en la figura.• Ajústelo como desee.• Apriete el pomo que se muestra en la figura.

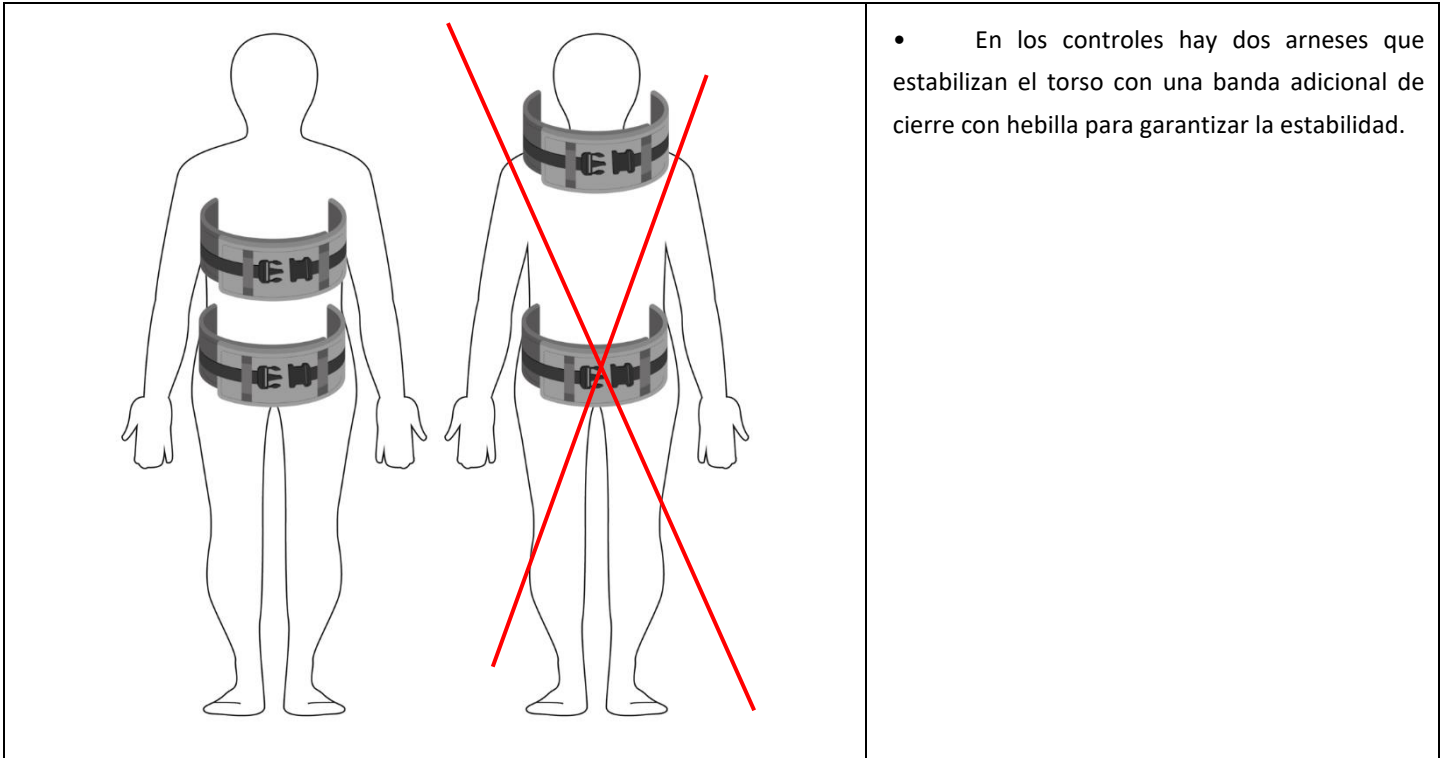

- En los controles hay dos arneses que estabilizan el torso con una banda adicional de cierre con hebilla para garantizar la estabilidad.

2.4. Altura de la sección de la pelvis

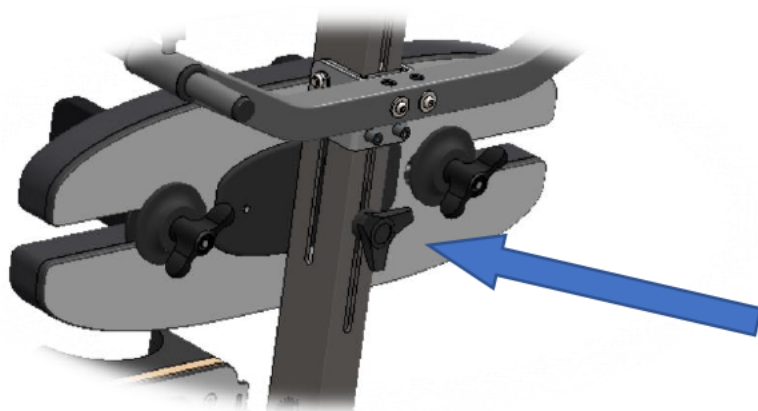


Figura 9



**Tiempo medio
necesario:**
<5 min

- Afloje el pomo que se muestra en la figura.
- Ajustelo como desee.
- Apriete el pomo que se muestra en la figura.

2.5. Anchura de los controles laterales de la pelvis

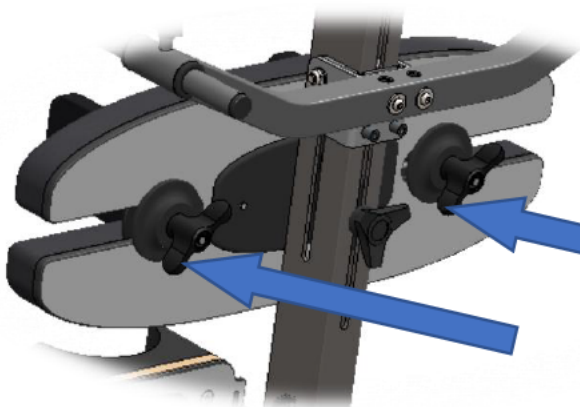


Figura 10




Tiempo medio necesario:
<5 min



En los controles hay dos arneses que estabilizan el torso con una banda adicional de cierre con hebilla para garantizar la estabilidad.

- Afloje el pomo que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete el pomo que se muestra en la figura.

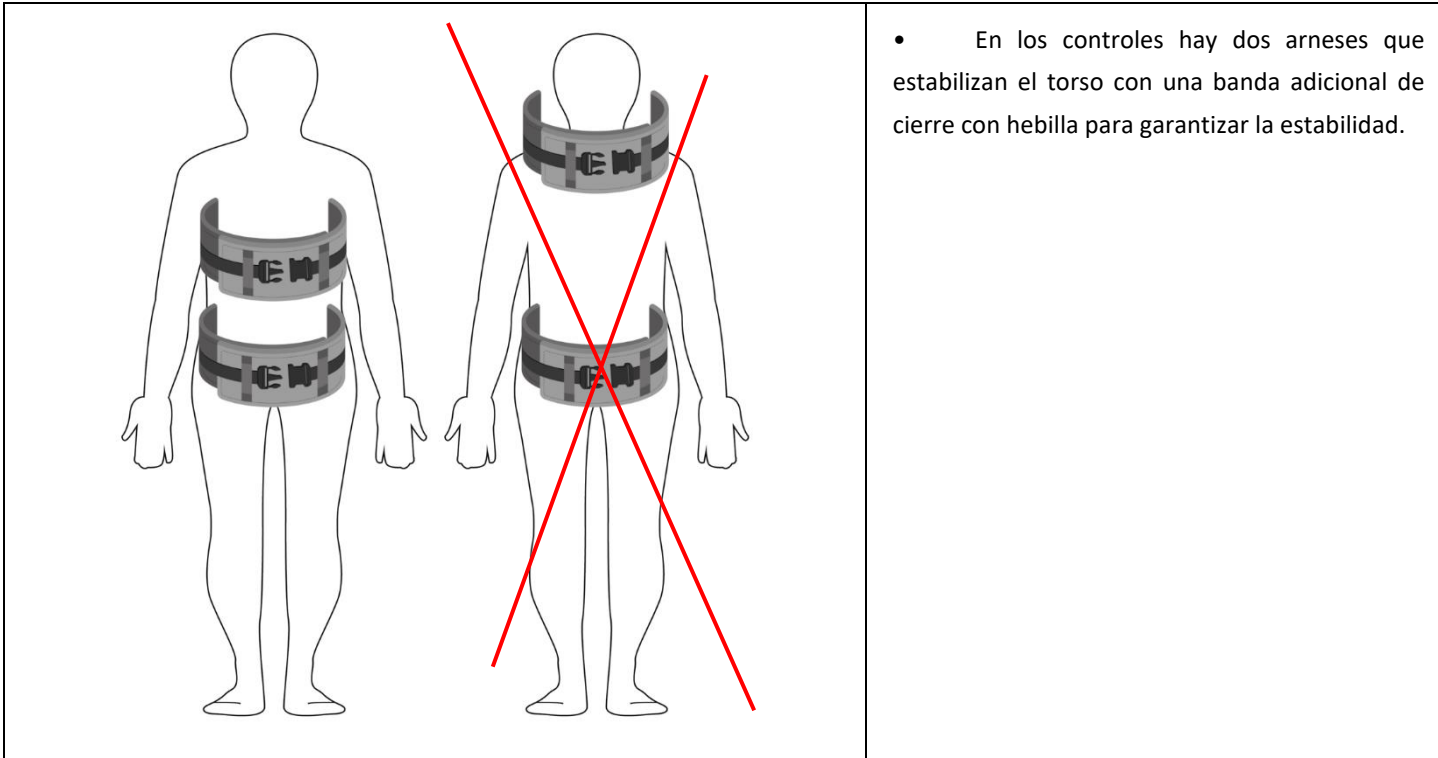

- En los controles hay dos arneses que estabilizan el torso con una banda adicional de cierre con hebilla para garantizar la estabilidad.

2.6. Altura y profundidad de la rodillera

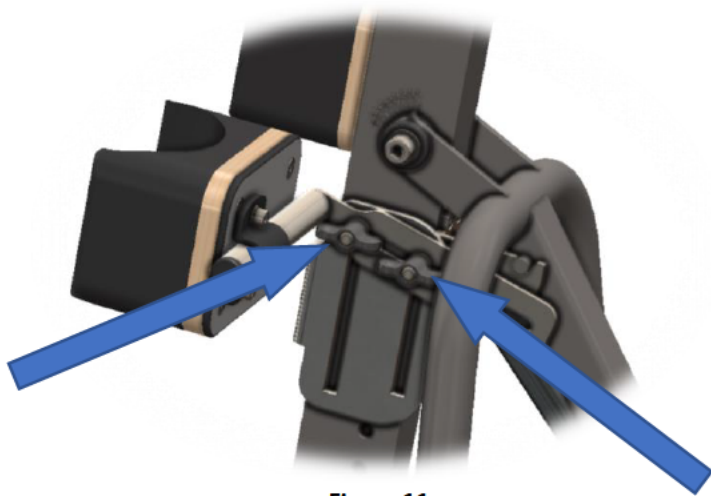


Figura 11



**Tiempo medio
necesario:**
<5 min



El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje los pomos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los pomos indicados en la figura.

2.7.Ángulo, rotación y anchura de la rodillera

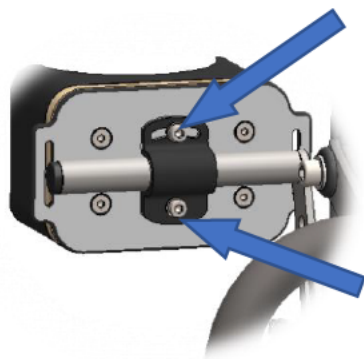


Figura 12



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL



5 mm



El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.



Hay bandas en las almohadillas que estabilizan la rodilla.

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.8. Altura de las paletas del reposapiés



Figura 13



**Tiempo medio
necesario:**
5 minutos



Al volver a colocar el perno, el pedestal se deslizará nuevamente dentro de la tela. Presta mucha atención.

- Extraiga el pasador que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Inserte de nuevo el pasador que se muestra en la figura.

2.9.Ángulo de las paletas del reposapiés

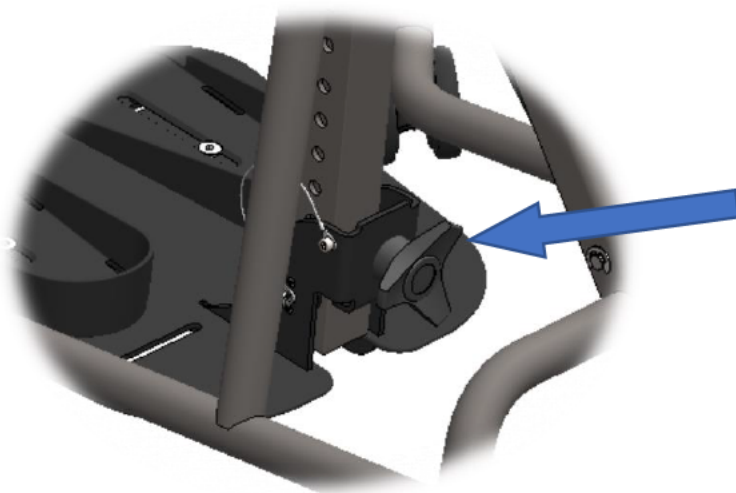


Figura 14



Tiempo medio necesario:

<5 min



Hay una escala graduada para mostrar el ángulo elegido.

- Utilice el pomo que se muestra en las figuras para realizar el ajuste deseado.

2.10. Abducción-aducción y rotación interna y externa del pie

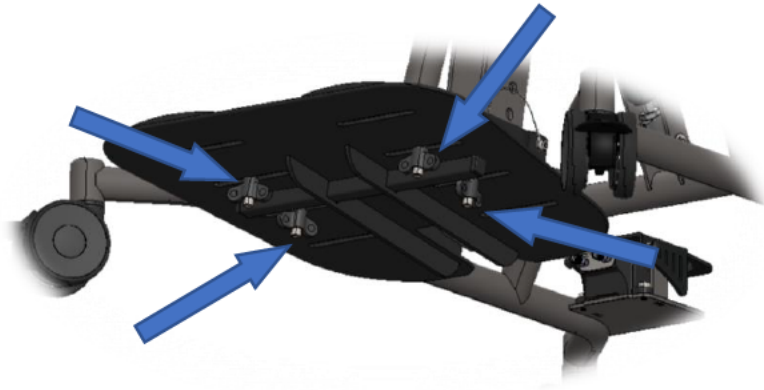


Figura 15



Tiempo medio necesario:

5 minutos



El reposapiés tiene varias ranuras donde se pueden anclar las contenciones de pie. Puede elegir los que mejor se adapten a sus necesidades.

- Afloje los pomos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los pomos indicados en la figura.

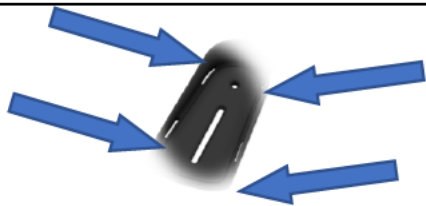


Figura 16

En el zapato hay ranuras para sujetar las cinchas.

2.11. Altura del reposacabezas


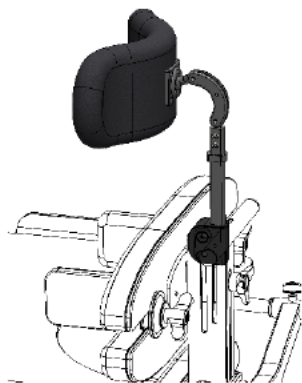


Figura 17



Tiempo medio necesario:
5 minutos

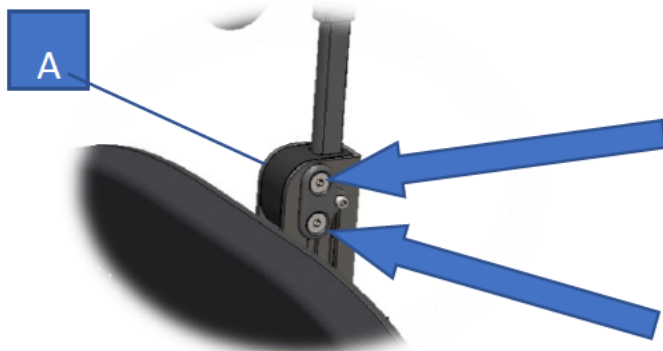


LLAVE HEXAGONAL



5 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Deslice el bloque (A) mostrado en la figura para ajustarlo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.12. Altura de la barra del reposacabezas

 <p>Figura 18</p>	 <p>Tiempo medio necesario: 5 minutos</p>
	<p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>4 mm</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Afloje el tornillo que se muestra en la figura.• Ajústelo como desee.• Apriete el tornillo indicado en la figura.

2.13. Posición de la almohadilla del reposacabezas

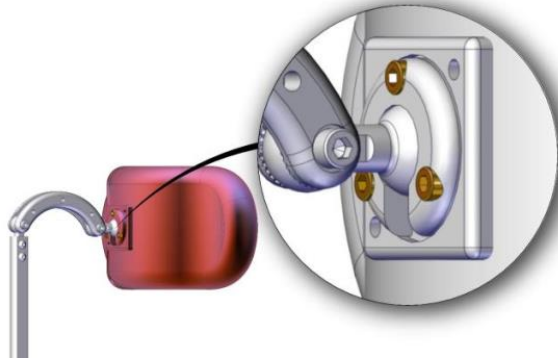


Figura 19



Tiempo medio necesario:
5 minutos




LLAVE HEXAGONAL



4 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

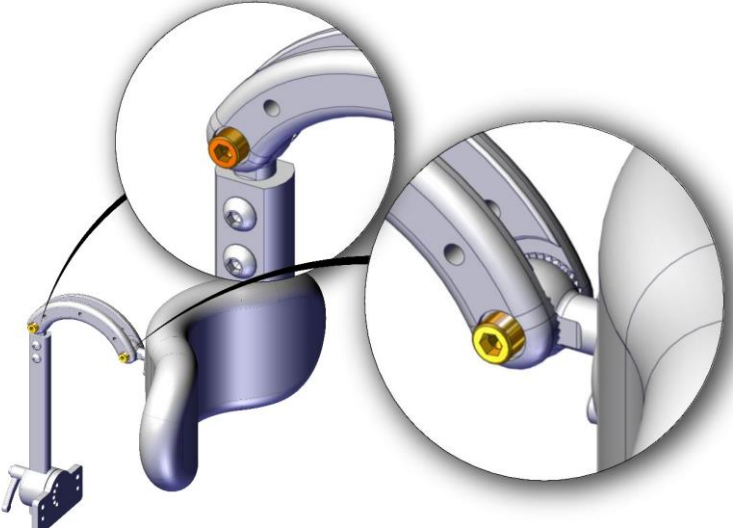2.14. Posición del reposacabezas

 <p data-bbox="569 786 675 812">Figura 20</p>	 <p data-bbox="1354 258 1543 345">Tiempo medio necesario: 5 minutos</p>
	<p data-bbox="1088 426 1306 448">LLAVE HEXAGONAL</p>  <p data-bbox="1452 455 1517 477">5 mm</p>
	<ul data-bbox="1081 571 1616 761" style="list-style-type: none"><li data-bbox="1081 571 1616 597">• Afloje los tornillos indicados en la figura.<li data-bbox="1081 654 1616 680">• Ajústelo como desee.<li data-bbox="1081 736 1616 762">• Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.15. Altura de la mesa

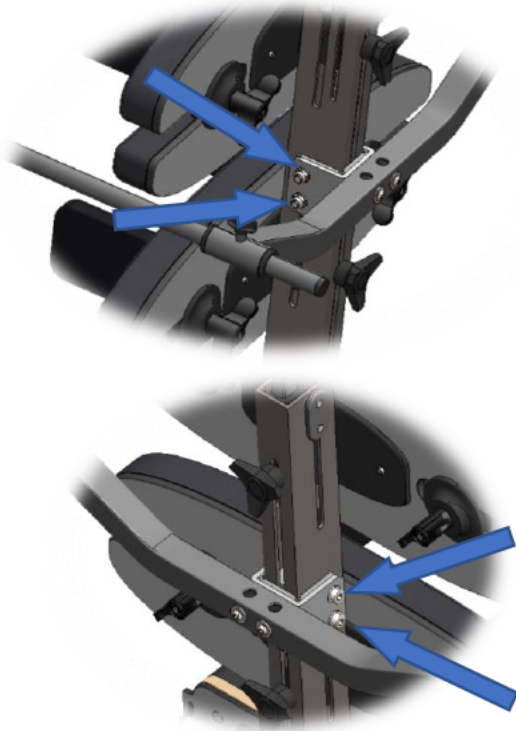


Figura 21



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL




6 mm

LLAVE HEXAGONAL





13 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

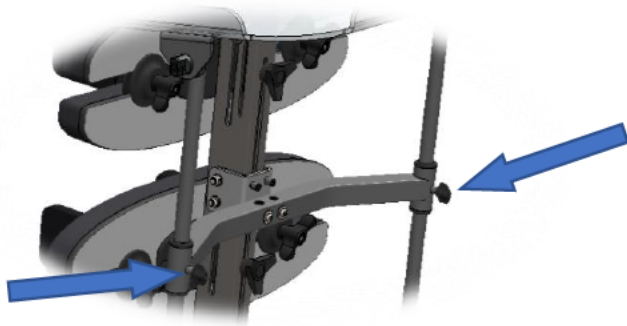

- Con el dispositivo utilizado en posición prona, también es posible ajustar la altura de la mesa simplemente girando los pomos que se muestran en la figura.

2.16. Ángulo de la mesa

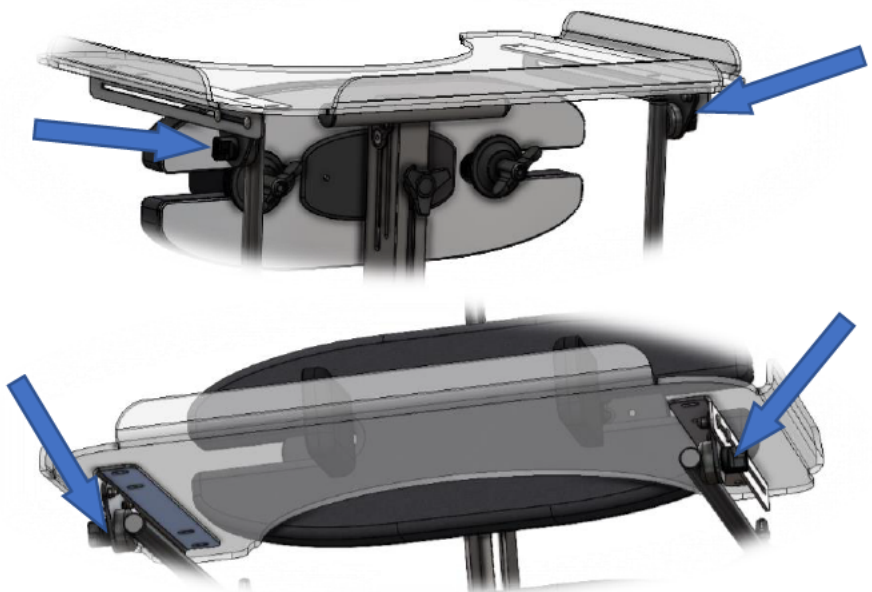 <p data-bbox="618 901 728 940">Figura 22</p>	 <p data-bbox="1419 244 1601 347">Tiempo medio necesario: <5 min</p> <ul data-bbox="1164 399 1619 682" style="list-style-type: none">• Afloje los pomos indicados en la figura.• Ajústelo como desee.• Apriete los pomos indicados en la figura.
--	---

2.17. Profundidad de la mesa

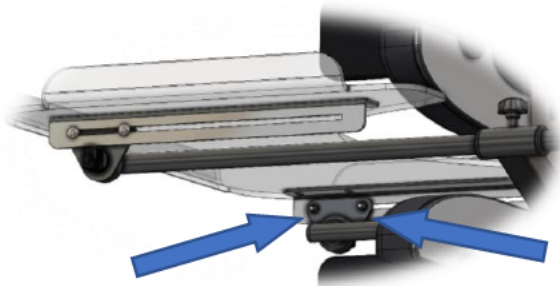


Figura 23



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL



13 mm



- Afloje el tornillo que se muestra en la figura.
- Ajustelo como desee.
- Apriete el tornillo indicado en la figura.



- Cuando se utiliza el dispositivo en configuración supina también es posible ajustar la altura de la mesa simplemente actuando sobre los mandos que se muestran en la figura.

3. USO DEL PRODUCTO

3.1. Uso de los frenos

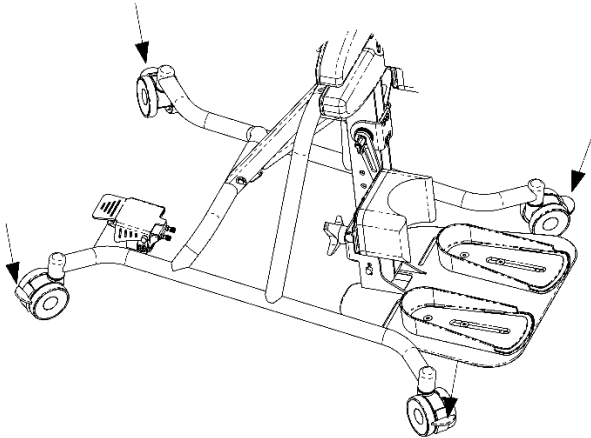 <p>Figura 24</p>	<p>ATENCIÓN</p> <p>Al pisar el freno, accione siempre todas las ruedas. Utilizar el producto con sólo algunas ruedas bloqueadas puede ser peligroso. Con los frenos aplicados, debe ser imposible empujar el producto.</p>
	<p></p> <p>El dispositivo no está diseñado para el transporte y manipulación de personas. No suelte nunca los frenos cuando el usuario esté sobre el dispositivo.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Utilice la punta del pie para bajar los cuatro pedales (uno para cada rueda) y bloquear las cuatro ruedas.• Para liberar los frenos de las cuatro ruedas, utilice la punta del pie para subir los cuatro pedales (uno para cada rueda) y liberar las cuatro ruedas.

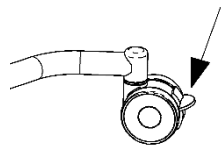


Figura 25
EMPUJAR - FRENO ACCIONADO

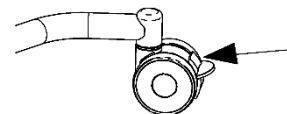


Figura 26
TIRAR - FRENO DESACTIVADO

3.2. Posición supina



REPOSACABEZAS MONTADO



SOPORTE DE MESA CON LA PARTE CÓNCAVA HACIA ARRIBA



CONTENCIÓN DE PIES ORIENTADOS HACIA DELANTE



3.2.1. Montaje en configuración supina



Figura 27




**Tiempo medio
necesario:**
10 minutos

LLAVE HEXAGONAL



4 mm

- Inserte la barra del reposacabezas.
- Apriete el tornillo indicado en la figura.

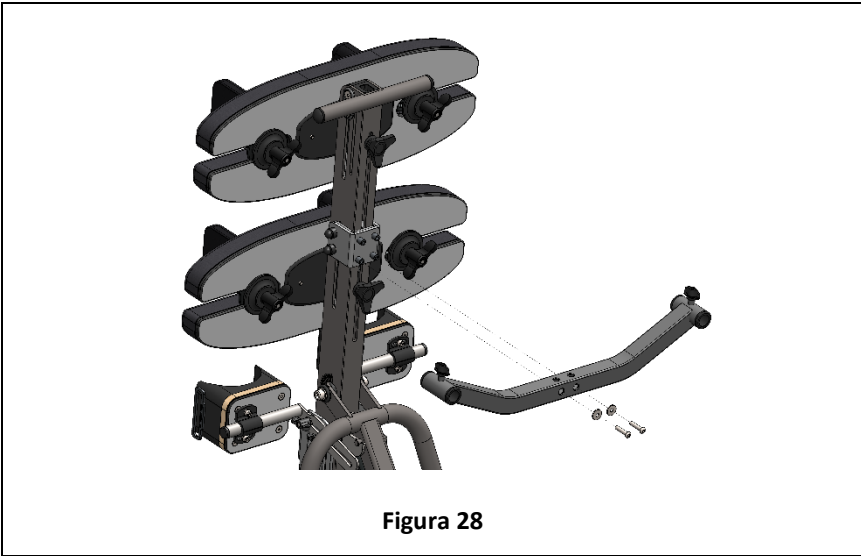

LLAVE HEXAGONAL



4 mm

- Monte el soporte de mesa como se muestra, con la parte cóncava hacia arriba.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.



Figura 29

- Inserte la tabla como se muestra.
- Apriete los pomos indicados en la figura.



Figura 30

LLAVE HEXAGONAL



4 mm

- Monte las contención de pies como se indica.
- Apriete los pomos indicados en la figura junto con los tornillos correspondientes.

3.3. Posición prona



REPOSACABEZAS NO MONTADO



SOPORTE DE MESA CON LA PARTE CÓNCAVA HACIA LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO



CONTENCIÓN PARA LOS PIES ORIENTADOS HACIA LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO



3.3.1. Montaje en configuración prona

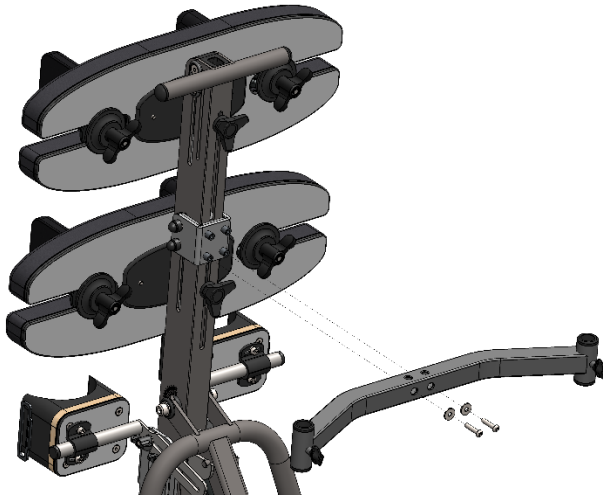


Figura 31



**Tiempo medio
necesario:**
10 minutos

LLAVE HEXAGONAL



4 mm

- Monte el soporte de mesa tal como se muestra, con la parte cóncava orientada hacia la parte posterior del dispositivo.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

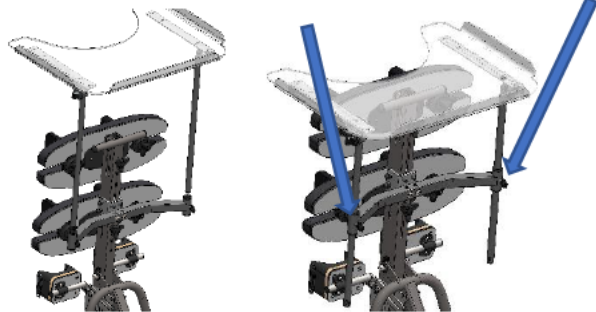


Figura 32

- Inserte la mesa como se muestra en la figura.
- Apriete los pomos indicados en la figura.

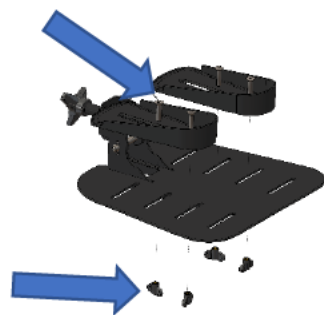


Figura 33

LLAVE HEXAGONAL



4 mm

- Monte las contencónes de pie como se indica.
- Apriete los pomos indicados en la figura junto con los tornillos correspondientes.

3.4. Transporte y almacenamiento

El producto puede transportarse en el maletero de un vehículo incluso sin caja. El producto también puede transportarse por vía aérea. Si es necesario enviar el producto, debe protegerse con un embalaje adecuado.

No se puede proporcionar un embalaje universal, por lo que el usuario debe proporcionarlo él mismo. El embalaje utilizado debe ser resistente al agua y al polvo y lo suficientemente fuerte como para proteger el producto de los golpes. Al colocar el producto en la caja, proteja todas las partes salientes con un poco de esponja o material similar.

Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar limpio y alejado de fuentes de calor.

4. MANTENIMIENTO





Un mantenimiento regular ayuda a mantener intactas la funcionalidad y la seguridad del producto. La falta de mantenimiento o un mantenimiento inadecuado podrían dar lugar a una limitación de la garantía. Evite el contacto prolongado del producto con el agua. Podría provocar la oxidación de las piezas metálicas. Evite la exposición prolongada del producto a la luz solar directa.



ATENCIÓN

Cualquier reparación del producto debe ser realizada por un centro de servicio autorizado.

4.1. Limpieza

	ATENCIÓN No utilice agua a alta presión para limpiar el producto. No utilice quitamanchas, disolventes ni ácidos,			
PIEZAS DE PLÁSTICO Y METAL	Basta con utilizar un paño humedecido con un detergente neutro.			
REVESTIMIENTO	 Lavar a máquina con agua caliente a 60°C	 Secar sin planchar	 No exprimir	 No blanquear

4.2. Controles para realizar en el producto

Tipo de operación	
A	Operación que puede realizar el usuario.
B	Operación que puede realizar un asistente.
C	Operación que debe ser realizada por un centro de servicio autorizado.

Operación	Frecuencia	Tipo de operación
Limpiar el producto	Semanal	B - Asistente
Comprobar el correcto funcionamiento de los frenos	Mensualmente	B - Asistente
Comprobar si hay fugas de aceite en todos los resortes de gas.	Mensualmente	B - Asistente

4.3.Reutilización

El producto es reutilizable. Antes de entregar el producto, hay que limpiarlo y mantenerlo en buen estado. Las instrucciones de funcionamiento se incluyen en este manual y deben entregarse en el momento de la entrega del producto.



ATENCIÓN

Esta operación sólo debe realizarse en un centro de servicio autorizado.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Masa total del producto (mín-máx) [kg]	MÍN 20 kg - MÁX 40 kg
Peso máximo del usuario	P01: 80 kg P02: 100 kg
Dimensiones totales (anchura, longitud y altura cuando está listo para su uso y cuando está cerrado y/o desmontado [mm]).	Altura: MÍN 1600 mm - MÁX 1950 mm Anchura: MÍN 650 mm - MÁX 800 mm Longitud: MÍN 900 mm - MÁX 1300 mm
Vida útil promedio [años]	5
Temperatura de uso	MÍN -10 °C - MÁX +40 °C
Temperatura de almacenamiento	MÍN -20 °C - MÁX +45 °C

5.1.Dibujos

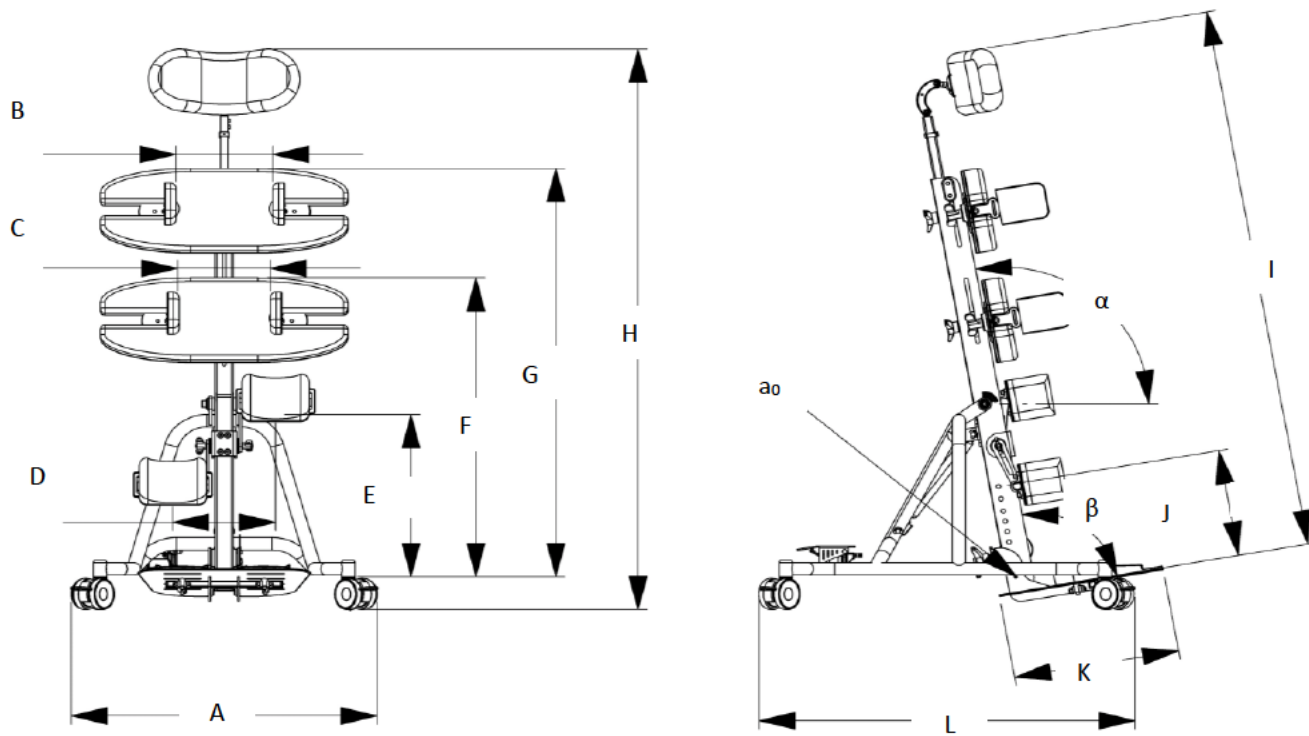


Figura 34

	P01	P02
A	650 mm	800 mm
H	1600 mm	1950 mm
L	900 mm	1300 mm
I	1500 mm	1850 mm
K	370 mm	440 mm



Para otras dimensiones citadas, véase el cuadro 2 (pág. 4)

6. Asistencia y condiciones de garantía

6.1. Condiciones de la garantía

Definiciones

FABRICANTE: Fabricante: la persona jurídica que fabrica un producto. Para el ámbito de aplicación del siguiente reglamento, el fabricante es:

Neatech.it s.r.l.

via Antonio de Curtis 4/A – 80040 – Cercola (NA)

Tel. +39 081 555 1946 – info@neatech.it – neatech@pec.it – www.neatech.it

N.° IVA IT04812481218 - REA NA715393

CLIENTE: Cliente es la persona física o jurídica que compra un producto al fabricante. Para el ámbito de aplicación de la siguiente normativa, el Cliente es el titular del documento fiscal emitido por el fabricante tras el suministro del producto.

PRODUCTO: Producto es el bien suministrado por el fabricante al cliente en ejecución de una orden de compra.

Alcance de la garantía

El fabricante se compromete a subsanar cualquier defecto, falta de calidad o falta de conformidad de los productos que le sea imputable como consecuencia de errores de diseño o construcción o defectos de material que se produzcan durante el periodo de aplicación de la garantía.

Período de aplicación de la garantía

El periodo de garantía comienza con la fecha de facturación al cliente. La duración del periodo de garantía varía según el tipo de producto.

Tipo de producto	Duración de la garantía [meses]
Producto completo	24
Piezas y accesorios (excluidas las baterías)	24
Baterías	6

Cuadro 3

Cualquier reparación o sustitución en garantía no altera el período de garantía original.

Exclusiones

La garantía cubre los defectos de conformidad de materiales y mano de obra.

La garantía no cubre las piezas sujetas a desgaste.

A modo de ejemplo, a continuación se enumeran algunas de las piezas sujetas a desgaste.

- Ruedas
- Piezas acolchadas (espumas de poliuretano, viscoelásticos)
- Fundas (incluidas lonas)
- Mangos y manijas
- Fusibles y bombillas
- Escobillas de motor eléctrico
- Filtros

La garantía se limita a los daños relacionados con el producto y en ningún caso puede cubrir los daños causados a terceros como consecuencia de un fallo del producto.

La garantía no cubre las piezas dañadas por sobrecarga, uso inadecuado, alteraciones y reparaciones realizadas por terceros no autorizados. La garantía queda anulada en caso de manipulación, almacenamiento incorrecto o mantenimiento inadecuado o no autorizado.

6.2. Número de serie

Para cualquier solicitud de asistencia o informe, indique el número de serie del producto en la etiqueta como se muestra en la figura.



Figura 35

Notas

Neatech.it s.r.l.
Via A. De Curtis 4/a
80040 Cercola (Na) Italy
ph. +39 081 5551946
fax +39 081 5552507
e-mail info@neatech.it
www.neatech.it