

TEDDY

MANUAL DEL USUARIO

2021-10

**"BECAUSE
EVERY-BODY
IS DIFFERENT"**



Nos preocupamos mucho por la calidad, la seguridad y la facilidad de uso de nuestros productos. Siempre nos esforzamos por mejorarlos. Descargue la última versión de este manual en este enlace.

<https://www.neatech-download.it/s222-manual/>

Índice

| | |
|--|----------|
| 1. PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO | 1 |
| 1.1. <i>Desembalaje.....</i> | 1 |
| 1.2. <i>Fijación</i> | 2 |
| 2. REGLAMENTO..... | 4 |
| 2.1. <i>Profundidad del asiento</i> | 8 |
| 2.2. <i>Aducción y abducción de caderas.....</i> | 9 |
| 2.3. <i>Anchura de piernas</i> | 10 |
| 2.4. <i>Contención de la pelvis.....</i> | 11 |
| 2.5. <i>Altura de la sección lumbar del respaldo</i> | 12 |
| 2.6. <i>Profundidad de la sección lumbar del respaldo</i> | 13 |
| 2.7. <i>Ángulo de inclinación de la sección lumbar del respaldo</i> | 14 |
| 2.8. <i>Ángulo de rotación de la sección lumbar del respaldo.....</i> | 15 |
| 2.9. <i>Desplazamiento horizontal de la sección lumbar del respaldo</i> | 16 |
| 2.10. <i>Altura de la sección tronco-hombros del respaldo</i> | 17 |
| 2.11. <i>Profundidad de la sección tronco-hombros del respaldo</i> | 18 |
| 2.12. <i>Ángulo de inclinación de la sección tronco-hombros del respaldo.....</i> | 19 |
| 2.13. <i>Ángulo de rotación de la sección tronco-hombros del respaldo</i> | 20 |
| 2.14. <i>Desplazamiento horizontal de la sección tronco-hombros del respaldo</i> | 21 |
| 2.15. <i>Ángulo del respaldo.....</i> | 22 |
| 2.16. <i>Altura del reposabrazos</i> | 23 |
| 2.17. <i>Inclinación del reposabrazos</i> | 24 |
| 2.18. <i>Posición del reposabrazos</i> | 25 |
| 2.19. <i>Aducción y abducción del reposabrazos.....</i> | 27 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 2.20. | <i>Altura de las paletas del reposapiés</i> | 28 |
| 2.21. | <i>Ángulo de las paletas del reposapiés</i> | 29 |
| 2.22. | <i>Ángulo del reposapiés</i> | 30 |
| 2.23. | <i>Aducción y abducción de las paletas del reposapiés</i> | 31 |
| 2.24. | <i>Rotación dentro y fuera de la paleta del reposapiés</i> | 32 |
| 3. | USO DEL PRODUCTO | 33 |
| 3.1. | <i>Fijación</i> | 33 |
| 3.2. | <i>Transporte y almacenamiento</i> | 35 |
| 4. | MANTENIMIENTO | 36 |
| 4.1. | <i>Limpieza</i> | 36 |
| 4.2. | <i>Controles para realizar en el producto</i> | 37 |
| 4.3. | <i>Reutilización</i> | 37 |
| 5. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 38 |
| 5.1. | <i>Dibujos</i> | 39 |
| 6. | Asistencia y condiciones de garantía | 41 |
| Notas | | 43 |



ATENCIÓN

Este símbolo indica la presencia de peligro para el usuario o de daños en el producto. Siga siempre las instrucciones cuando este símbolo esté presente.



PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

Este símbolo indica la presencia de un riesgo de atrapamiento.



INFORMACIÓN

Este símbolo indica información general para simplificar o explicar mejor el uso del producto.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Este símbolo indica la necesidad de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado o con el fabricante.



NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

En caso de incidente, póngase en contacto con el fabricante.



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Póngase en contacto con el fabricante para obtener una lista de los centros de servicio autorizados.



Este producto y todas sus piezas no pueden tratarse como residuos domésticos normales. Para obtener más información sobre cómo reciclar y/o desechar este producto, póngase en contacto con su servicio local de eliminación de residuos.



Cualquier modificación no autorizada del producto puede aumentar el riesgo de lesiones personales y daños al producto. Todas las modificaciones deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado. No utilice accesorios ni piezas de repuesto no autorizados. No utilice el producto en combinación con otros aparatos sanitarios sin antes considerar los posibles riesgos de combinar varios productos.



El uso de este producto en una silla de ruedas puede modificar la posición del centro de gravedad del sistema silla + usuario, con el consiguiente aumento del riesgo de vuelco. Considere la posibilidad de añadir dispositivos antivuelco a su silla.



Además de la información de este manual, siga siempre la información del manual de la silla de ruedas en la que está montado el respaldo. En caso de discrepancia en la información, póngase en contacto con el fabricante.



ATENCIÓN: Está prohibido utilizar el producto o sus piezas para fines distintos de los indicados en este manual. Siga las instrucciones dadas para un uso adecuado. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado del producto.



La información de este manual puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Toda la información, figuras y especificaciones se basan en los detalles del producto disponibles en la fecha de redacción de este documento. Son ejemplos representativos y no pretenden ser exactamente iguales al producto real.



TEMPERATURA

La temperatura de algunas superficies puede aumentar si el producto se expone a temperaturas ambiente elevadas o a la luz solar directa.



INFORMACIÓN

Para obtener información sobre cómo las personas con discapacidad visual pueden acceder a la información y las instrucciones, póngase en contacto con el fabricante.



El producto no está diseñado para ser desmontado. No hay partes del producto diseñadas para ser manipuladas durante su uso normal.



No instale, mantenga ni utilice el producto sin haber leído todas las advertencias y todo este manual. Conserve siempre este manual cerca del producto.

1. PREPARACIÓN PARA EL PRIMER USO

1.1. Desembalaje

| | |
|--|---|
| <p>Dentro de la caja puede encontrar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teddy• Manual |  <p>ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE</p> <p>Para reciclar correctamente los materiales de embalaje, siga las instrucciones de su servicio local de eliminación de residuos.</p> |
|--|---|

El producto se entrega ya montado y listo para su uso. Antes de empezar a utilizar el producto, asegúrese de que todos los componentes están presentes. Es preferible que la primera instalación del producto la realice un centro de servicio autorizado.

1.2.Fijación

El producto debe fijarse a una base de silla de ruedas o de sistema postural.



La silla de ruedas o la base deben poder soportar el peso del sistema y el peso del usuario.



El montaje del dispositivo influye en el centro de gravedad y la estabilidad de la silla de ruedas o de la base utilizada.



Utilizar sólo 8 tornillos TSPEI M5x30 DIN 7991.


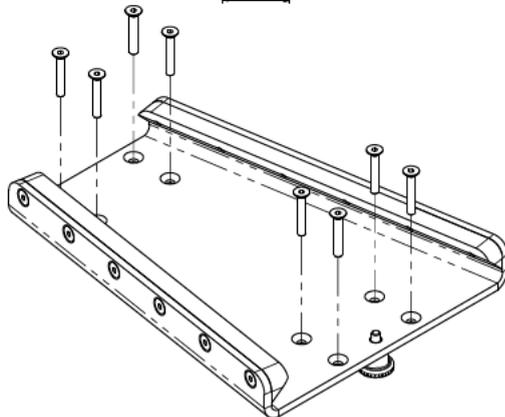


Figura 1

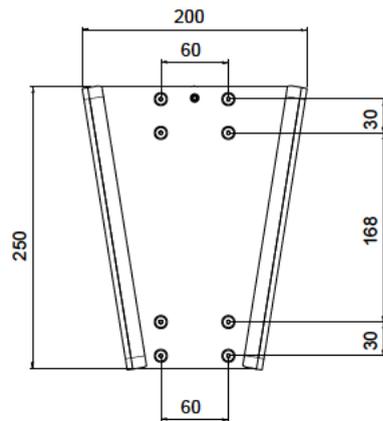

Tiempo medio necesario:

15 minutos

LLAVE HEXAGONAL



3 mm

La silla de ruedas o la base utilizada debe tener una superficie de apoyo adecuada con un grosor mínimo de 20 mm.

Debe haber 8 orificios roscados como se muestra en la figura (dimensiones en mm).





2. REGLAMENTO

| Tipo de operación | |
|-------------------|--|
| A | Operación que puede realizar el usuario. |
| B | Operación que puede realizar un asistente. |
| C | Operación que debe ser realizada por un centro de servicio autorizado. |

| Ajuste | Tipo de operación | DIM. | Sección |
|---|-------------------|----------------------------|---------|
| Profundidad del asiento | B - Asistente | D1, D2 | 2.1 |
| Aducción y abducción de la contención del cadera | B - Asistente | P, α_1 , α_2 | 2.2 |
| Anchura de pernas | B - Asistente | P1, P2 | 2.3 |
| Contención de la pelvis | B - Asistente | A | 2.4 |
| Altura de la sección lumbar del respaldo | B - Asistente | h2 | 2.5 |
| Profundidad de la sección lumbar del respaldo | B - Asistente | E | 2.6 |
| Ángulo de inclinación de la sección lumbar del respaldo | B - Asistente | N2 | 2.7 |
| Ángulo de rotación de la sección lumbar del respaldo | B - Asistente | Q2 | 2.8 |
| Desplazamiento horizontal de la sección lumbar del respaldo | B - Asistente | M | 2.9 |

| | | | |
|---|---------------|----------|------|
| Altura de la sección tronco-hombros del respaldo | B - Asistente | h1 | 2.10 |
| Profundidad de la sección tronco-hombros del respaldo | B - Asistente | E | 2.11 |
| Ángulo de inclinación de la sección tronco-hombros del respaldo | B - Asistente | N1 | 2.12 |
| Ángulo de rotación de la sección tronco-hombros del respaldo | B - Asistente | Q1 | 2.13 |
| Desplazamiento horizontal de la sección tronco-hombros del respaldo | B - Asistente | M | 2.14 |
| Ángulo del respaldo | B - Asistente | α | 2.15 |
| Altura del reposabrazos | B - Asistente | Y | 2.16 |
| Inclinación del reposabrazos | B - Asistente | ND | 2.17 |
| Posición del reposabrazos | B - Asistente | ND | 2.18 |
| Aducción y abducción del reposabrazos | B - Asistente | ND | 2.19 |
| Altura de las paletas del reposapiés | B - Asistente | J | 2.20 |
| Ángulo de las paletas del reposapiés | B - Asistente | ND | 2.21 |
| Ángulo del reposapiés | B - Asistente | β | 2.22 |
| Aducción y abducción de las paletas del reposapiés | B - Asistente | ND | 2.23 |
| Rotación dentro y fuera de la paleta del reposapiés | B - Asistente | ND | 2.24 |

Cuadro 1

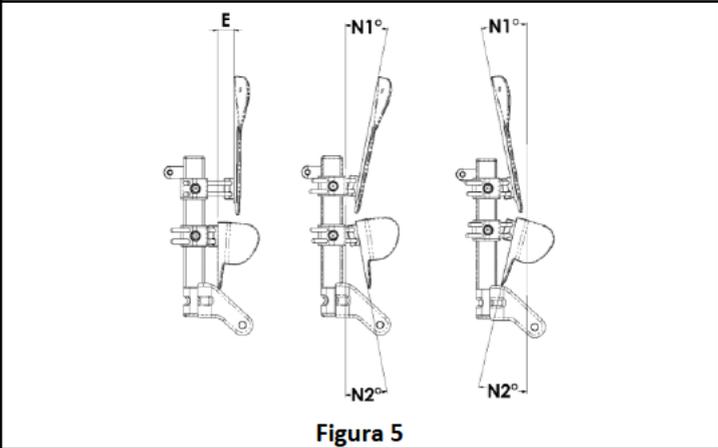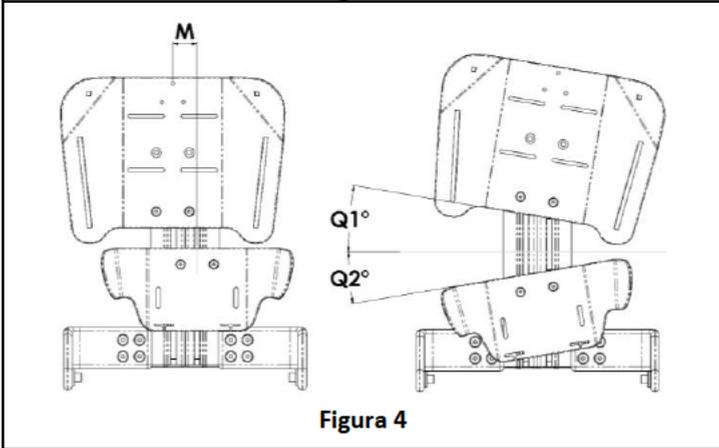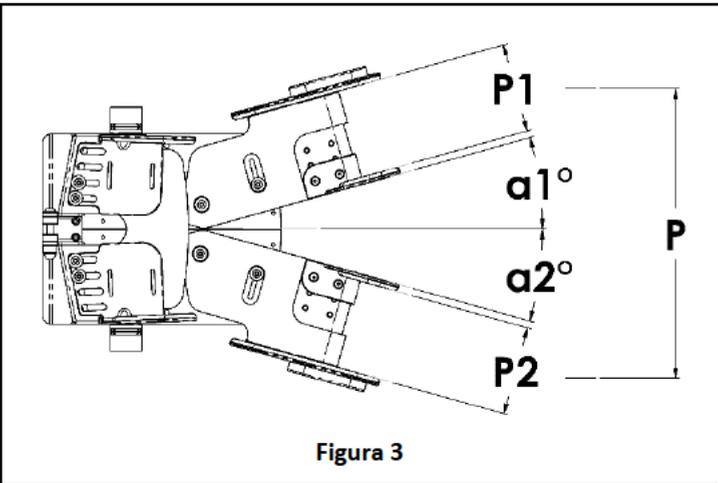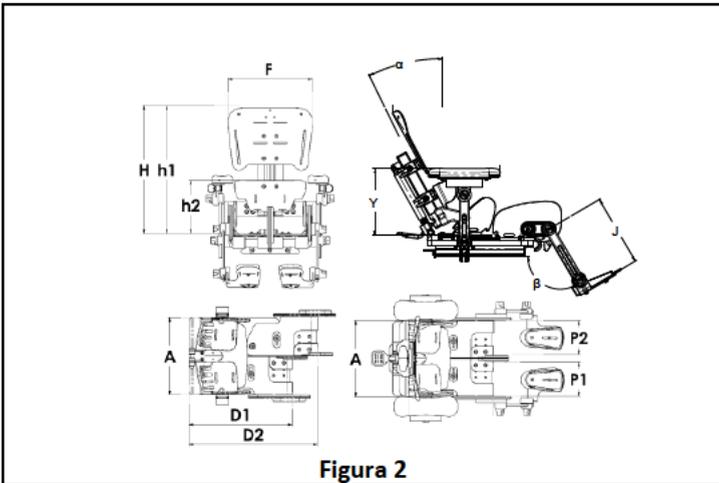

| DIM. | Configuración | Rango |
|--|---------------|------------|
| A | P01 | 220 mm |
| | P02 | 260 mm |
| | P03 | 300 mm |
| α | | MÍN -90° |
| | | MÁX +120° |
| $\alpha 1, \alpha 2$ | | MÍN -5° |
| | | MÁX +16° |
| β | | MÍN -10° |
| | | MÁX 90° |
| D1, D2 | | MÍN 140 mm |
| | | MÁX 270 mm |
| E | | MÍN 0 mm |
| | | MÁX 30 mm |
| h1 | | MÍN 310 mm |
| | | MÁX 430 mm |
| h2 | | MÍN 130 mm |
| | | MÁX 250 mm |
| J | | MÍN 80 mm |
| | | MÁX 180 mm |
| M | | MÍN -15 mm |
| | | MÁX +15 mm |

| DIM. | Configuración | Rango |
|---------------|---------------|------------|
| N1, N2 | | MÍN -15° |
| | | MÁX +15° |
| P | P01 | 380 mm |
| | P02 | 420 mm |
| | P03 | 460 mm |
| P1, P2 | | 60 mm |
| | P01 | 80 mm |
| | | 100 mm |
| | | 120 mm |
| | P02 | 80 mm |
| | | 100 mm |
| | | 120 mm |
| | P03 | 100 mm |
| 120 mm | | |
| 140 mm | | |
| Q1, Q2 | | MÍN -10° |
| | | MÁX +10° |
| Y | | MÍN 90 mm |
| | | MÁX 180 mm |

Cuadro 2

2.1. Profundidad del asiento


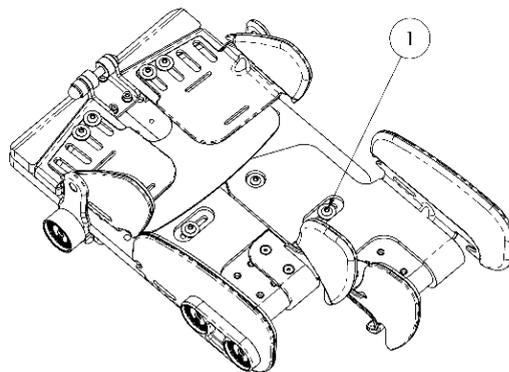


Figura 6



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL

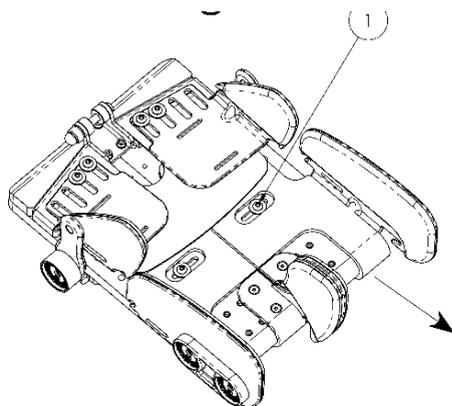

4 mm



El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje el tornillo que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete el tornillo indicado en la figura.

2.2.Aducción y abducción de caderas

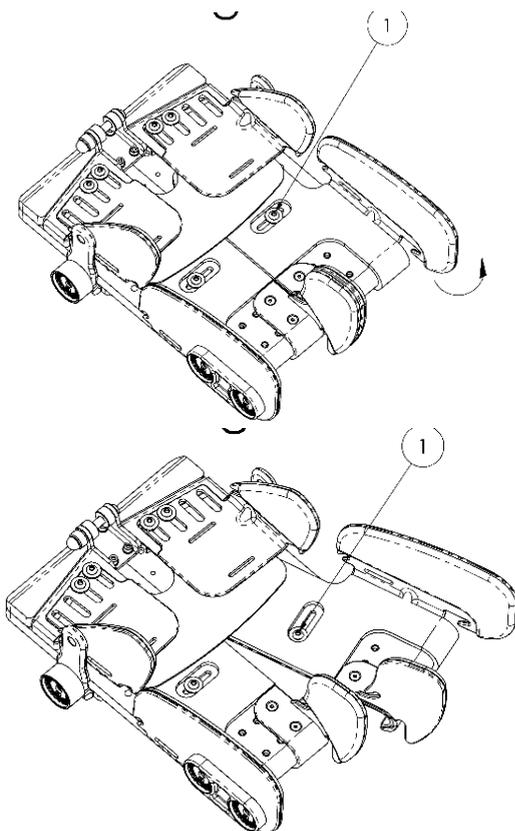


Figura 7



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL



4 mm



El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje el tornillo que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete el tornillo indicado en la figura.

2.3. Anchura de piernas

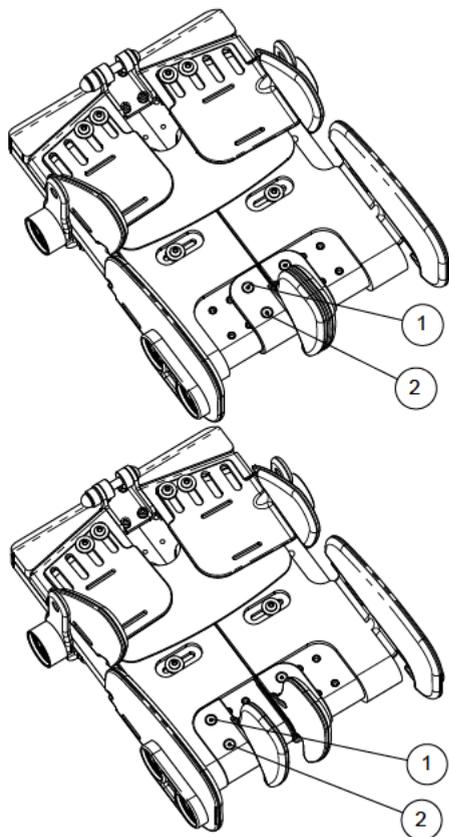


Figura 8



**Tiempo medio
necesario:**
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL



3 mm



El lado izquierdo y el
derecho pueden
ajustarse por separado.

- Desatornille los tornillos indicados en la figura.
- Ajustelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.4. Contención de la pelvis

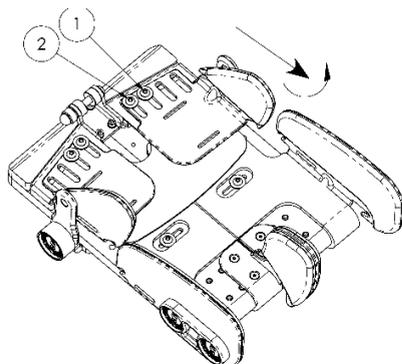


Fig. 5

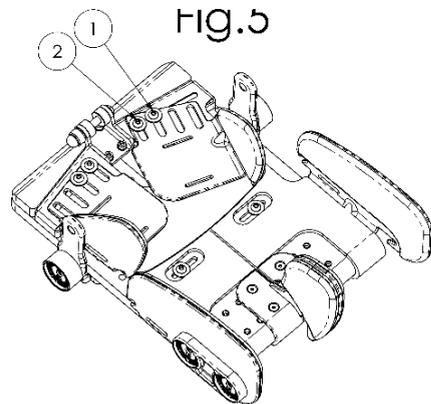


Figura 9



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL



4 mm



El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.5. Altura de la sección lumbar del respaldo

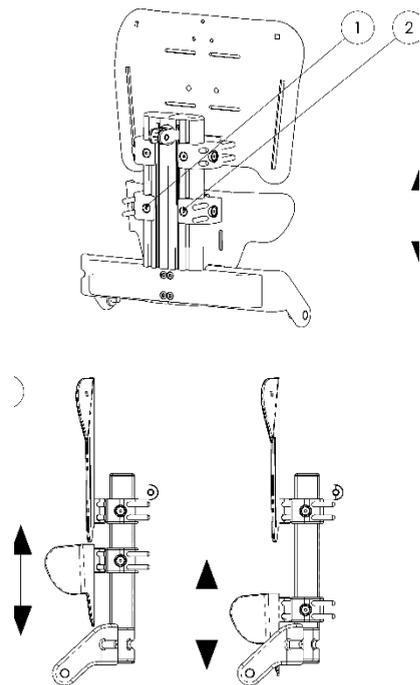


Figura 10



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL



3 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.6. Profundidad de la sección lumbar del respaldo


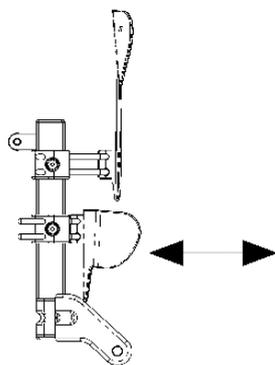


Figura 11



**Tiempo medio
necesario:**
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL

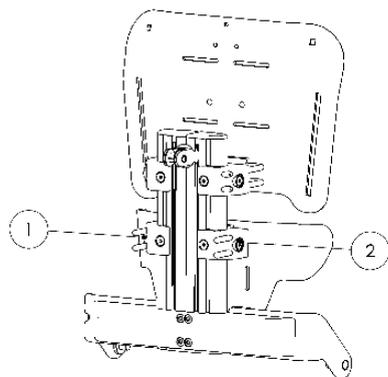

3 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.7. Ángulo de inclinación de la sección lumbar del respaldo


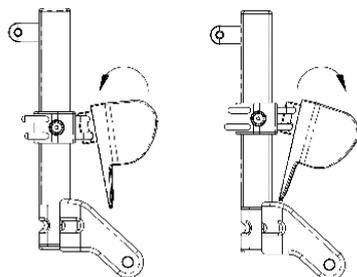


Figura 12



**Tiempo medio
necesario:**
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL

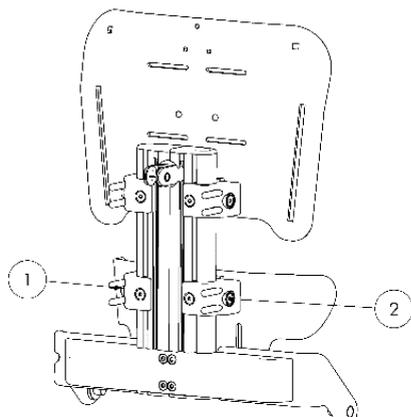


3 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.8. Ángulo de rotación de la sección lumbar del respaldo

| | |
|-------------------------|---|
| |  <p>Tiempo medio necesario: 5 minutos</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>3 mm</p> |
| <p>Figura 13</p> | <ul style="list-style-type: none">• Afloje los tornillos indicados en la figura.• Ajústelo como desee.• Apriete los tornillos indicados en la figura. |

2.9.Desplazamiento horizontal de la sección lumbar del respaldo
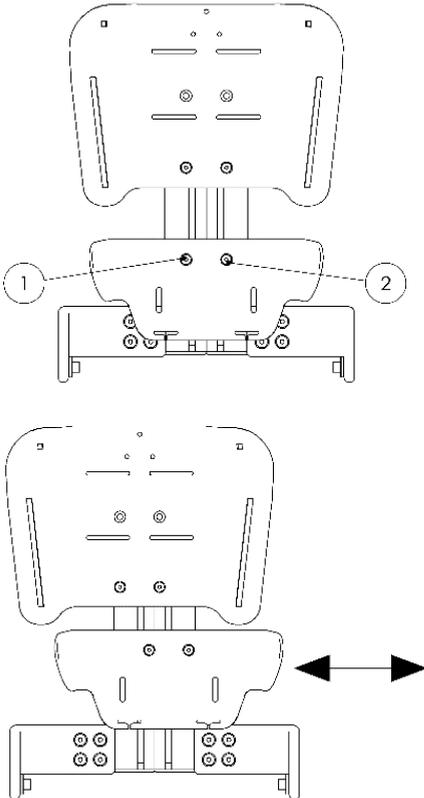
| | |
|--|---|
|  <p>Figura 14</p> |  <p>Tiempo medio necesario: 5 minutos</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>3 mm</p> |
| | <ul style="list-style-type: none">• Afloje los tornillos indicados en la figura.• Ajústelo como desee.• Apriete los tornillos indicados en la figura. |

2.10. Altura de la sección tronco-hombros del respaldo


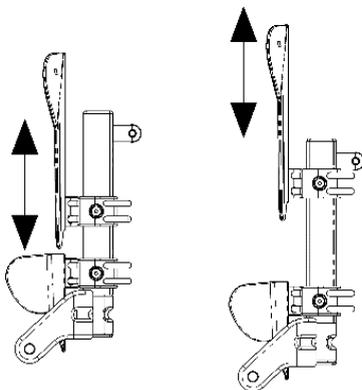


Figura 15



**Tiempo medio
necesario:**
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL

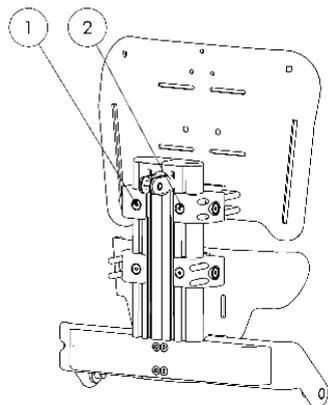

3 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.11. Profundidad de la sección tronco-hombros del respaldo


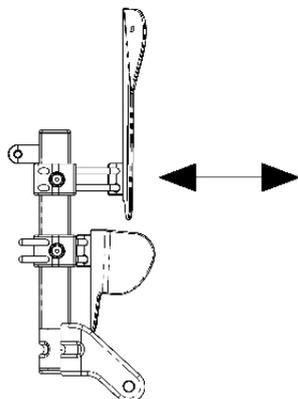


Figura 16



Tiempo medio necesario:
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL

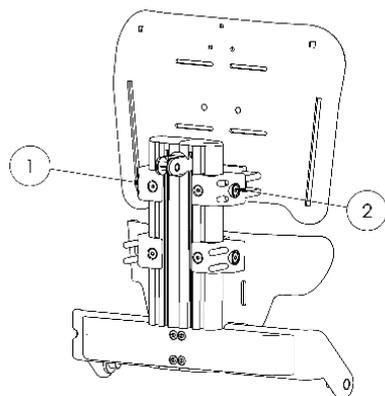

3 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.12. Ángulo de inclinación de la sección tronco-hombros del respaldo


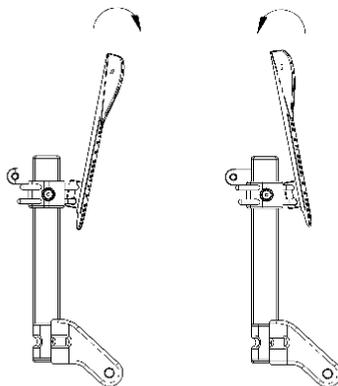


Figura 17



**Tiempo medio
necesario:**
5 minutos


LLAVE HEXAGONAL

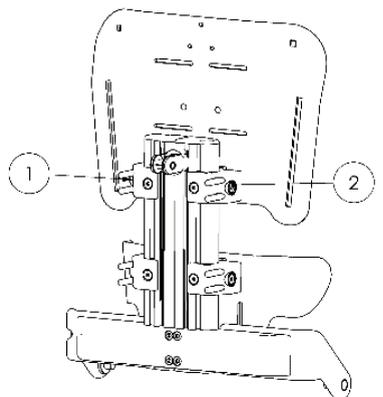

3 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.13. Ángulo de rotación de la sección tronco-hombros del respaldo
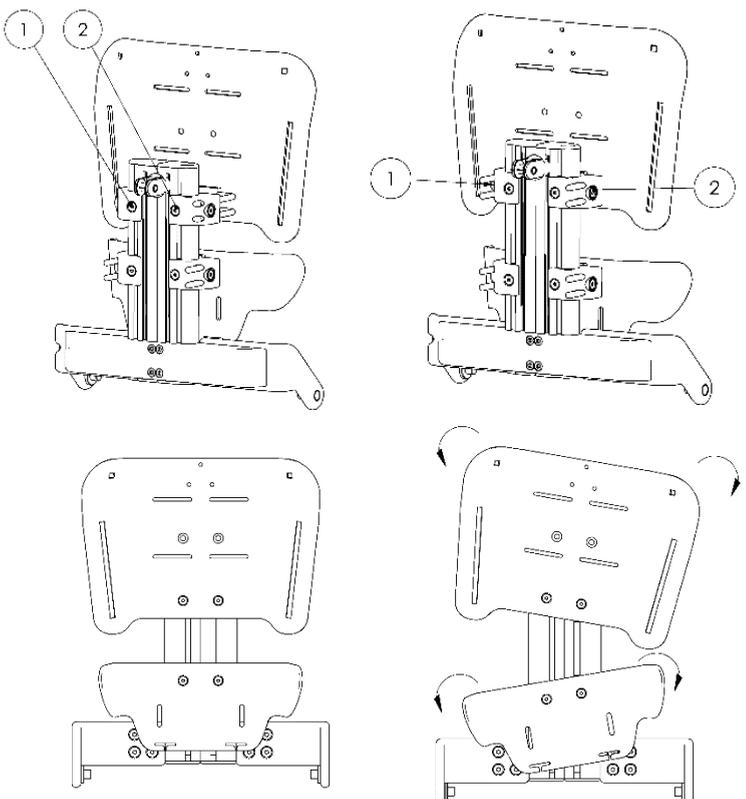
| | |
|--|---|
|  |  <p>Tiempo medio necesario: 5 minutos</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>3 mm</p> |
| <p>Figura 18</p> | <ul style="list-style-type: none">• Afloje los tornillos indicados en la figura.• Ajústelo como desee.• Apriete los tornillos indicados en la figura. |

2.14. Desplazamiento horizontal de la sección tronco-hombros del respaldo


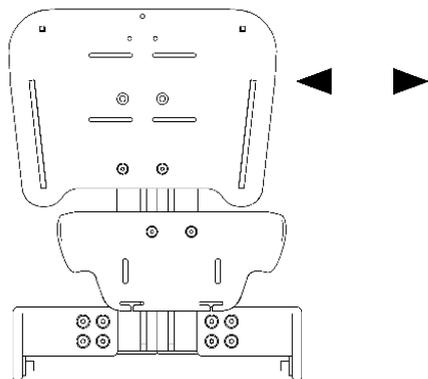


Figura 19



**Tiempo medio
necesario:**
5 minutos

LLAVE HEXAGONAL

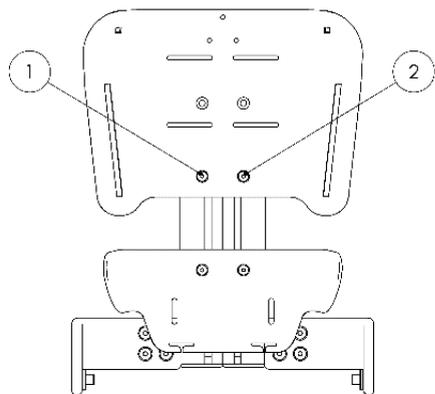

3 mm

- Afloje los tornillos indicados en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete los tornillos indicados en la figura.

2.15. Ángulo del respaldo


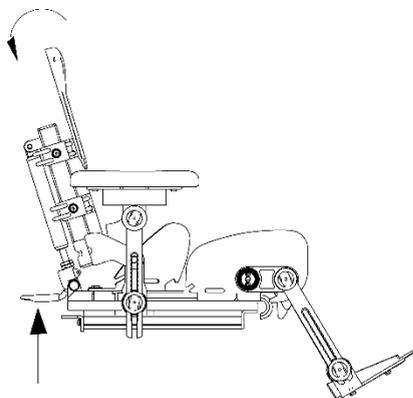


Figura 20

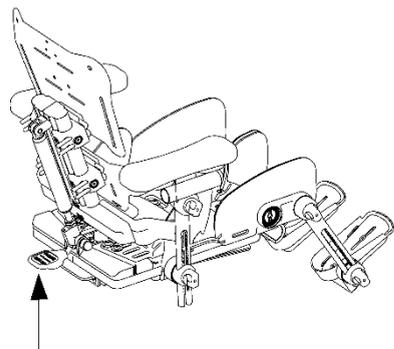

**Tiempo medio
necesario:**
1 minuto

- Suba la palanca indicada en la figura.
- Repita la operación para los 4 terminales.
- Suelte la palanca para bloquear el respaldo.

2.16. Altura del reposabrazos


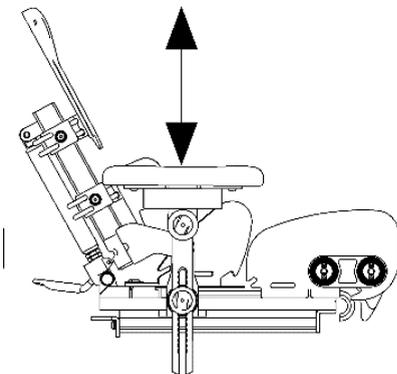


Figura 21



Tiempo medio necesario:
1 minuto

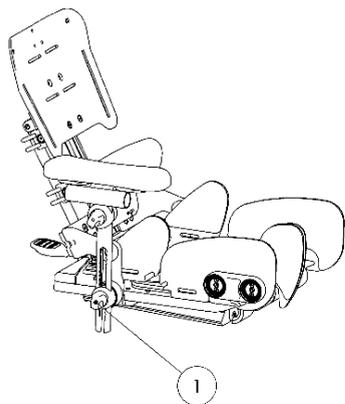

El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje la manija que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete la manija que se muestra en la figura.

2.17. Inclinación del reposabrazos


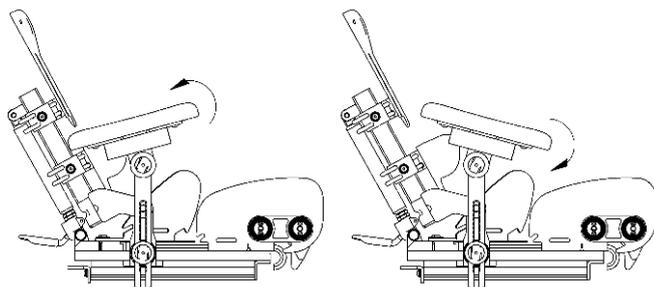


Figura 22



Tiempo medio necesario:
1 minuto

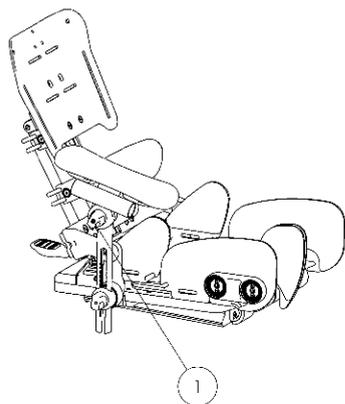

El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje la manija que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete la manija que se muestra en la figura.

2.18. Posición del reposabrazos

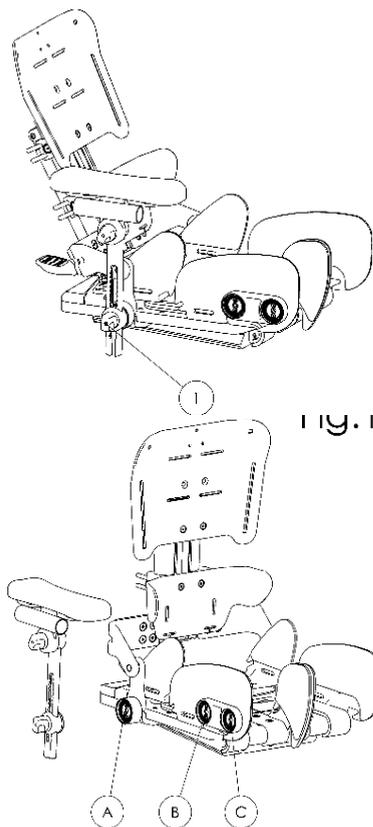


Figura 23



Tiempo medio necesario:
5 minutos



El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Desenrosque la manija que se muestra en la figura.
- Coloque el reposabrazos en una de las posiciones disponibles (A), (B), (C).
- Atornille la manija que se muestra en la figura.



INFORMACIÓN

Al anclar el reposabrazos en el punto (B), (C), como se muestra, el reposabrazos quedará integrado con la contención de cadera. Al anclar el reposabrazos en el punto (A), como se muestra en la figura, el reposabrazos no formará parte integrante de la contención de cadera.

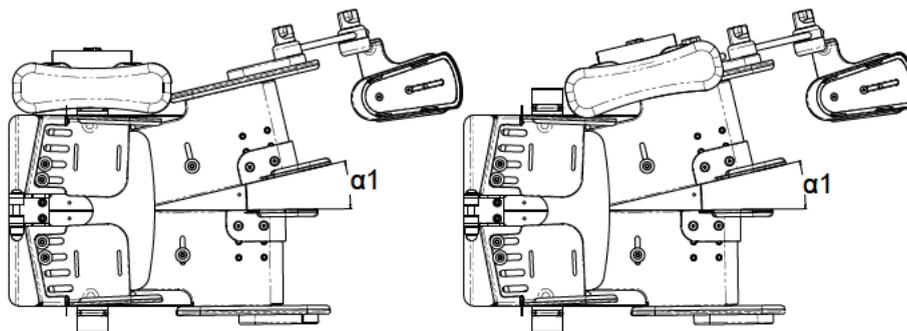
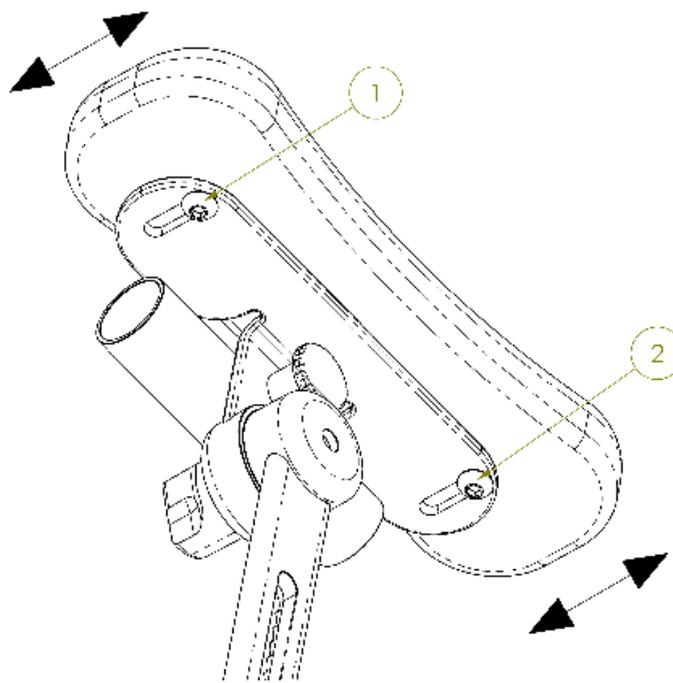


Figura 24

2.19. Aducción y abducción del reposabrazos

| | |
|---|--|
|  <p>Figura 25</p> |  <p>Tiempo medio necesario: 5 minutos</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>4 mm</p>  <p>El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none">• Afloje los tornillos indicados en la figura.• Ajústelo como desee.• Apriete los tornillos indicados en la figura. |

2.20. Altura de las paletas del reposapiés


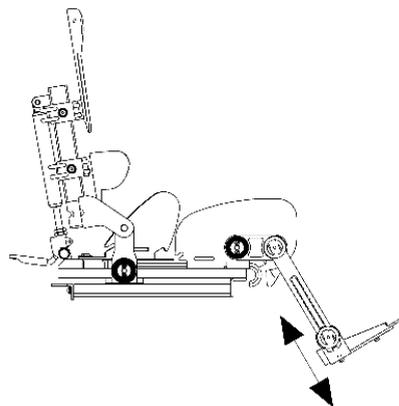


Figura 26



Tiempo medio necesario:
1 minuto

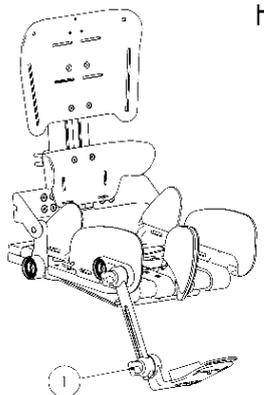

El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje la manija que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete la manija que se muestra en la figura.

2.21. Ángulo de las paletas del reposapiés


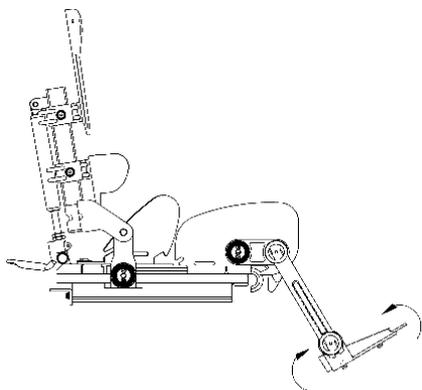


Figura 27



Tiempo medio necesario:
1 minuto

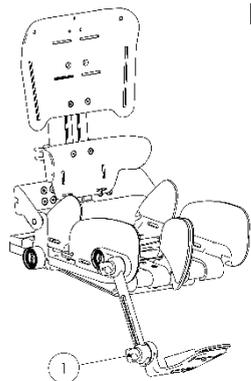

El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje la manija que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete la manija que se muestra en la figura.

2.22. Ángulo del reposapiés


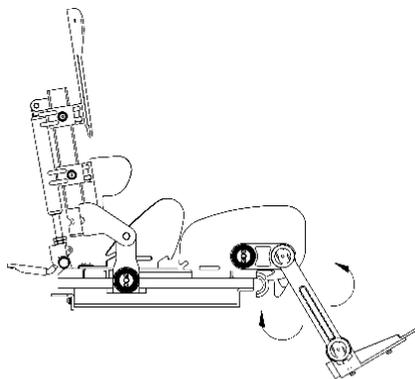


Figura 28




Tiempo medio necesario:
1 minuto

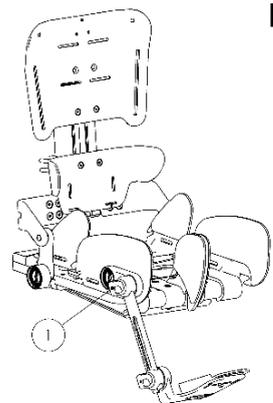


El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.

- Afloje la manija que se muestra en la figura.
- Ajústelo como desee.
- Apriete la manija que se muestra en la figura.

2.23. Aducción y abducción de las paletas del reposapiés

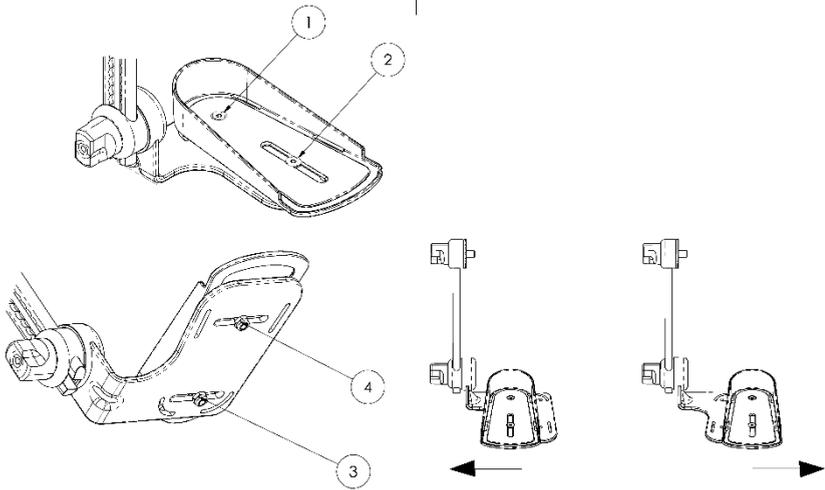
| | |
|--|---|
|  <p>Figura 29</p> |  <p>Tiempo medio necesario: 5 minutos</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>2,5 mm</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>7 mm</p> |
| |  <p>El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenrosque los tornillos indicados en la figura sujetando por detrás las tuercas correspondientes. • Ajústelo como desee. • Apriete los tornillos indicados en la figura con sus tuercas. |


2.24. Rotación dentro y fuera de la paleta del reposapiés
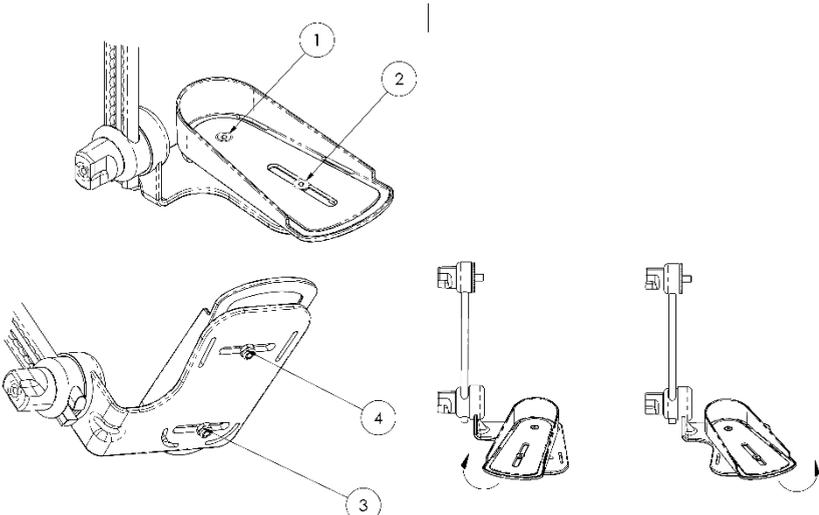
| | |
|--|--|
|  <p>Figura 30</p> |  <p>Tiempo medio necesario: 5 minutos</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>2,5 mm</p> |
| | <p>LLAVE HEXAGONAL</p>  <p>7 mm</p> |
| |  <p>El lado izquierdo y el derecho pueden ajustarse por separado.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Desenrosque los tornillos indicados en la figura sujetando por detrás las tuercas correspondientes. • Ajústelo como desee. • Apriete los tornillos indicados en la figura con sus tuercas. | |

3. USO DEL PRODUCTO

3.1. Fijación
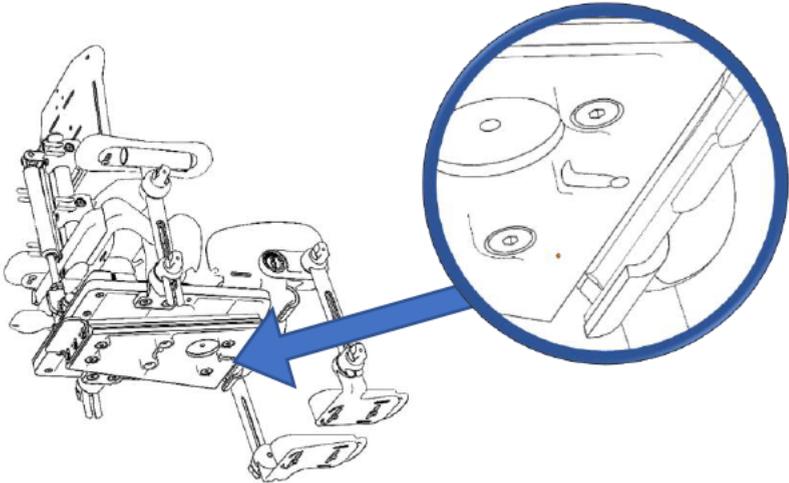
| | |
|--|--|
|  <p data-bbox="571 915 675 941">Figura 31</p> |  <p data-bbox="1354 319 1521 374"><u>Tiempo medio necesario:</u></p> <p data-bbox="1430 383 1543 409">5 minutos</p> |
| | |
| | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1081 705 1617 941">• Para enganchar el dispositivo, inserte el dispositivo Teddy en la interfaz hasta que el pistón de resorte de la interfaz intercepte el orificio situado debajo del dispositivo. Para más información sobre el montaje de la interfaz, consulte el apartado 1.2 |

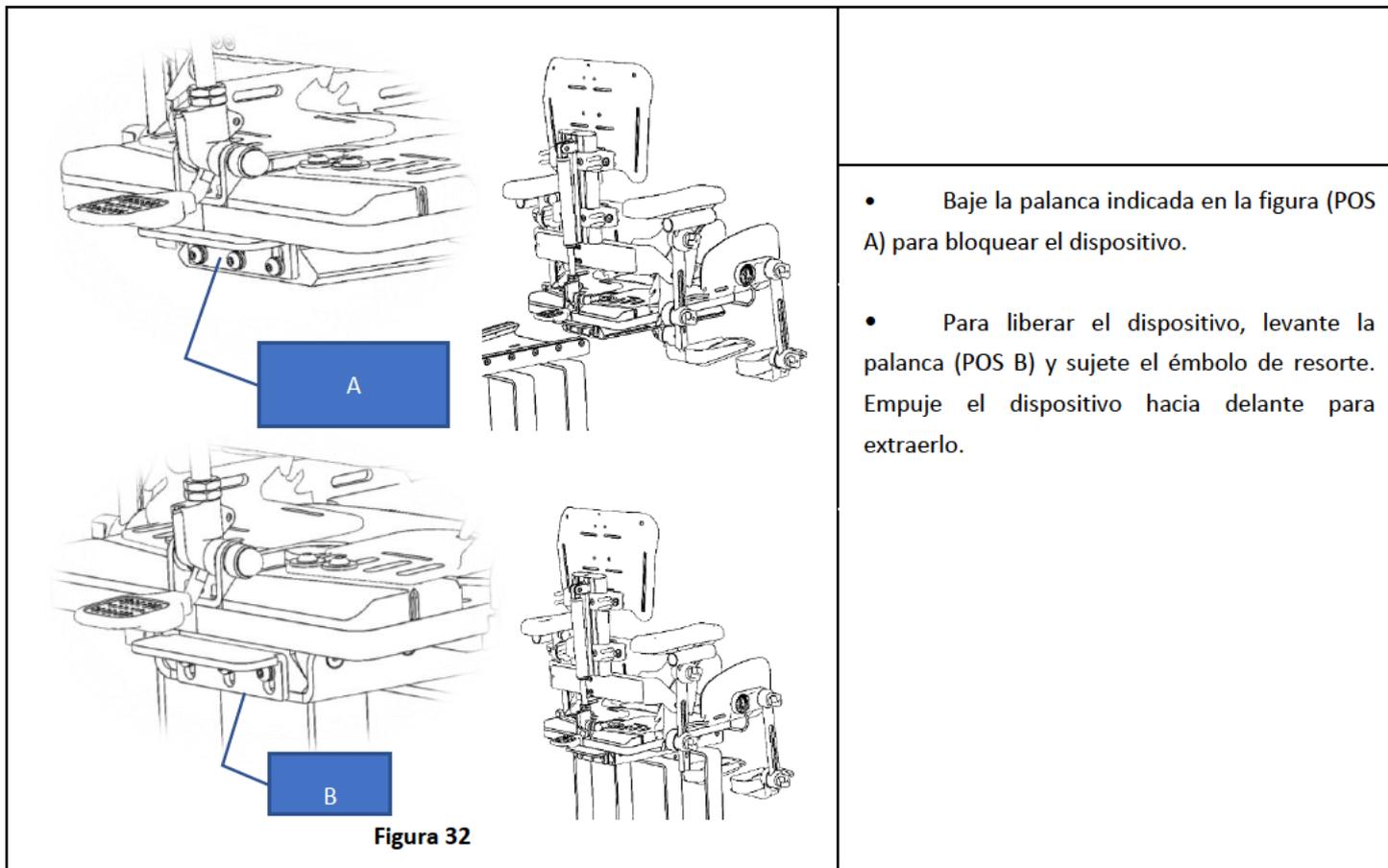

3.2. Transporte y almacenamiento

El producto puede transportarse en el maletero de un vehículo incluso sin caja. El producto también puede transportarse por vía aérea. Si es necesario enviar el producto, debe protegerse con un embalaje adecuado.

No se puede proporcionar un embalaje universal, por lo que el usuario debe proporcionarlo él mismo. El embalaje utilizado debe ser resistente al agua y al polvo y lo suficientemente fuerte como para proteger el producto de los golpes. Al colocar el producto en la caja, proteja todas las partes salientes con un poco de esponja o material similar. Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar limpio y alejado de fuentes de calor.

4. MANTENIMIENTO

Un mantenimiento regular ayuda a mantener intactas la funcionalidad y la seguridad del producto. La falta de mantenimiento o un mantenimiento inadecuado podrían dar lugar a una limitación de la garantía. Evite el contacto prolongado del producto con el agua. Podría provocar la oxidación de las piezas metálicas. Evite la exposición prolongada del producto a la luz solar directa.



ATENCIÓN

Cualquier reparación del producto debe ser realizada por un centro de servicio autorizado.

4.1. Limpieza

No utilice agua a alta presión para limpiar el producto. Para las piezas de plástico, utilice un paño suave humedecido con un detergente neutro. Para los revestimientos y fundas, utilice agua tibia y un detergente neutro. No utilice quitamanchas, disolventes, ácidos, etc. Limpie las distintas partes del respaldo por separado: separe las partes de tejido de la chapa. Para ello, actúe sobre los broches situados en la parte posterior del respaldo y retire el acolchado. Abra la cremallera de la parte posterior del relleno y extraiga la esponja.

| | | | | |
|----------------------|--|---|--|---|
| PLACA | Basta con utilizar un paño humedecido con un detergente neutro. | | | |
| REVESTIMIENTO |  Lavar a máquina con agua caliente a 60°C |  Secar sin planchar |  No exprimir |  No blanquear |
| ESPUMA | Después de retirar espuma de la funda, límpiela simplemente con un paño humedecido. No utilice ningún tipo de jabón o detergente. No sumerja la espuma directamente en agua. Luego, deje secar al aire. Antes de volver a colocar el revestimiento, asegúrese de que la espuma esté bien seca. | | | |

Cuadro 3

4.2. Controles para realizar en el producto

| Tipo de operación | |
|-------------------|--|
| A | Operación que puede realizar el usuario. |
| B | Operación que puede realizar un asistente. |
| C | Operación que debe ser realizada por un centro de servicio autorizado. |

Cuadro 4

| Operación | Frecuencia | Tipo de operación |
|---|-------------------|-------------------|
| Compruebe que el producto esté correctamente colocado. Véase el apartado 3.1. | Antes de cada uso | B - Asistente |
| Limpiar el producto. | Semestral | B - Asistente |

Cuadro 5

4.3.Reutilización

El producto es reutilizable. Antes de entregar el producto, hay que limpiarlo y mantenerlo en buen estado. Las instrucciones de funcionamiento se incluyen en este manual y deben entregarse en el momento de la entrega del producto.



ATENCIÓN

Esta operación sólo debe realizarse en un centro de servicio autorizado.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|---|
| Masa total del producto (mín-máx) [kg] | MÍN 7,7 kg - MÁX 8,3 kg |
| El producto cumple los requisitos de inflamabilidad de la norma ISO 7176-16 | YES - SÍ |
| Peso máximo del usuario | 50 kg |
| Dimensiones totales (anchura, longitud y altura cuando está listo para su uso y cuando está cerrado y/o desmontado) | Anchura global: MÍN-410 mm - MÁX 490 mm Longitud total (profundidad): 525 mm Altura total: 700 mm |
| Vida útil promedio [años] | 5 |

5.1.Dibujos

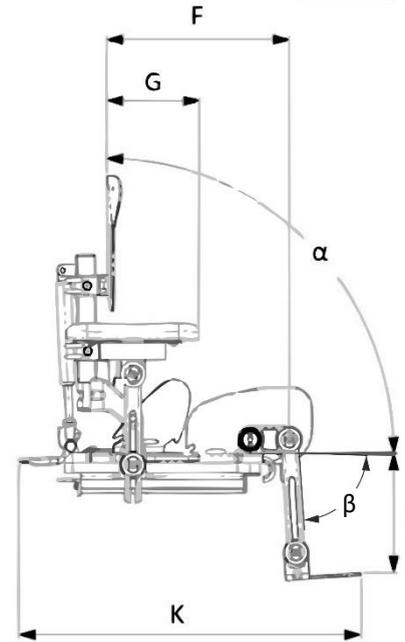
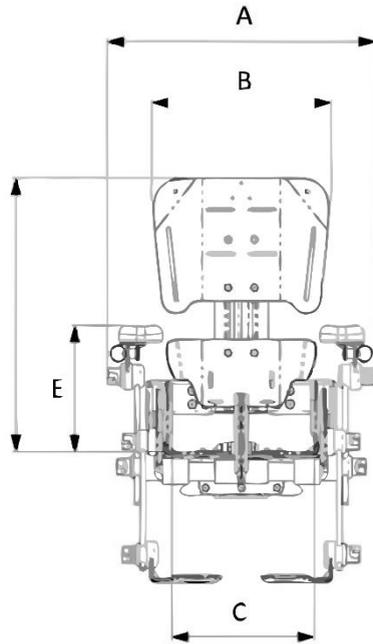


Figura 33

| | P01 | P02 | P03 |
|----------|--------------------------|------------|------------|
| A | 410 mm | 450 mm | 490 mm |
| B | 285 mm | 325 mm | 365 mm |
| C | 220 mm | 260 mm | 300 mm |
| D | 700 mm | | |
| E | MÍN 90 mm MÁX 180 mm | | |
| F | MÍN 210 mm MÁX 340 mm | | |
| G | MÍN 130 mm MÁX 350 mm | | |
| H | MÍN 310 mm MÁX 430 mm | | |
| J | MÍN 80 mm MÁX 180 mm | | |
| K | 525 mm | | |
| α | MÍN 90° MÁX 120° | | |
| β | MÍN -10° MÁX 90° | | |

Cuadro 6

6. Asistencia y condiciones de garantía

Definiciones

FABRICANTE: Fabricante: la persona jurídica que fabrica un producto. Para el ámbito de aplicación del siguiente reglamento, el fabricante es:

Neatech.it s.r.l.

via Antonio de Curtis 4/A – 80040 – Cercola (NA)

Tel. +39 081 555 1946 – info@neatech.it – neatech@pec.it – www.neatech.it

N.° IVA IT04812481218 - REA NA715393

CLIENTE: Cliente es la persona física o jurídica que compra un producto al fabricante. Para el ámbito de aplicación de la siguiente normativa, el Cliente es el titular del documento fiscal emitido por el fabricante tras el suministro del producto.

PRODUCTO: Producto es el bien suministrado por el fabricante al cliente en ejecución de una orden de compra.

Alcance de la garantía

El fabricante se compromete a subsanar cualquier defecto, falta de calidad o falta de conformidad de los productos que le sea imputable como consecuencia de errores de diseño o construcción o defectos de material que se produzcan durante el periodo de aplicación de la garantía.

Período de aplicación de la garantía

El periodo de garantía comienza con la fecha de facturación al cliente. La duración del periodo de garantía varía según el tipo de producto.

| Tipo de producto | Duración de la garantía [meses] |
|--|---------------------------------|
| Sillas de ruedas manuales y sistemas posturales | 24 |
| Sillas de ruedas electrónicas (sin incluir baterías) | 24 |
| Piezas y accesorios para sillas de ruedas (sin incluir baterías) | 24 |

Cuadro 7

Cualquier reparación o sustitución en garantía no altera el período de garantía original.

Exclusiones

La garantía cubre los defectos de conformidad de materiales y mano de obra.

La garantía no cubre las piezas sujetas a desgaste.

A modo de ejemplo, a continuación se enumeran algunas de las piezas sujetas a desgaste.

- Ruedas
- Piezas acolchadas (espumas de poliuretano, viscoelásticos)
- Fundas (incluidas lonas)
- Mangos y manijas
- Fusibles y bombillas
- Escobillas de motor eléctrico
- Filtros

La garantía se limita a los daños relacionados con el producto y en ningún caso puede cubrir los daños causados a terceros como consecuencia de un fallo del producto.

La garantía no cubre las piezas dañadas por sobrecarga, uso inadecuado, alteraciones y reparaciones realizadas por terceros no autorizados. La garantía queda anulada en caso de manipulación, almacenamiento incorrecto o mantenimiento inadecuado o no autorizado.

Notas

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

